

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHẨU TRANG Y TẾ

1. Mô tả sản phẩm:

Khẩu trang y tế ILT Trắng 4 lớp bao gồm:

+ 2 Lớp ngoài: vải không dệt PP

+ Lớp thứ 3: Vải lọc kháng khuẩn, lọc virus, bụi bẩn.

+ Lớp trong: vải tinh khiết.

2. Công dụng:

Có tác dụng ngăn chặn bụi khói, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay ,trường học...

Hướng dẫn sử dụng:

- Khi đeo khẩu trang cần lưu ý các bước sau:
 - Cầm vào 2 dây đeo, kéo khẩu trang sang 2 bên
 - Đeo dây khẩu trang qua tai, mắc dây đeo vào vành tai
 - Định hình thanh nẹp mũi
- Cầm quai tháo khẩu trang ra khi sử dụng xong
- Sau khi tháo khẩu trang, tránh chạm vào mặt ngoài, gấp khẩu trang sao cho mặt ngoài gập vào trong, sau đó bỏ thùng rác

3. Bảo quản:

- Bảo quản nơi sạch, khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời tiếp xúc ...

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO
GIÁM ĐỐC



NÔNG TIẾN LIÊM