

Số: 11:2022/HDSĐ-PHANA

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đèn hồng ngoại

Chủng loại: PN29

1. Hướng dẫn sử dụng:


1. Cắm phích vào ổ điện.
2. Di chuyển đèn đến nơi cần điều trị, dùng tay bóp nhẹ cần trượt trên thân đèn và giữ lại kéo lên hoặc hạ thấp xuống để điều chỉnh độ cao – thấp của đèn, điều chỉnh sao cho khoảng cách từ bóng đèn đến vùng da cần điều trị trung bình khoảng 50cm và xoay cần có bóng đèn sao cho tia hồng ngoại phải chiếu thẳng góc với vùng da điều trị.
3. Chỉnh thời gian (Timer) theo yêu cầu (thường quy định mỗi lần chiếu trung bình từ 10 phút đến 15 phút hoặc lâu hơn tùy theo chỉ định của BS) (đối với loại có hẹn giờ và chuông báo)
4. Bật công tắc đèn hồng ngoại sau khi đã điều chỉnh thời gian. Đèn sẽ tự động tắt đồng thời với chuông reo đúng như thời gian đã điều chỉnh. Kết thúc quá trình chiếu → bạn tắt công tắc (**On – Off**).
5. Muốn lập lại quá trình ban đầu, bạn làm trình tự theo **bước 3**.
6. Kết thúc quá trình điều trị bạn nhấn công tắc **On – Off**.

Khi chiếu nên theo dõi cảm giác của người bệnh và cẩn thận với bệnh nhân có bệnh tiểu đường và vùng da nhạy cảm. Tránh chiếu vùng gáy vì dễ gây tụt huyết áp. Khi chiếu vùng mặt phải che 2 mắt bằng khăn ướt hoặc bông gòn ướt để tránh gây loét giác mạc ...

Chú ý: Trong quá trình sử dụng, nếu đèn không cháy có thể xảy ra các trường hợp sau:

1. Bóng đèn bị đứt.
2. Phần tiếp xúc ở đuôi đèn không tốt (bị lỏng), bạn nên kiểm tra lại phần này.

Lưu ý: Bóng đèn cũng có tuổi thọ của nó, do đó khi sử dụng thời gian dài (khoảng 2.000 giờ) nó cũng sẽ tự động không sáng nữa, lúc đó nên thay bóng mới.

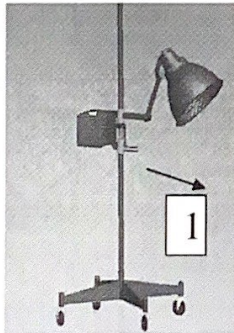

2. Cảnh báo và thận trọng:

- Không sử dụng nếu không có chỉ định của bác sĩ
- Làm theo đúng phác đồ điều trị

3. Điều kiện bảo quản:

- *Điều kiện bảo quản:* Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

