

Medical device



ENDO MASTER Disposable Biopsy Forceps

Chứng nhận số 18-4298

Nhóm sản phẩm: tế bào học, sử dụng một lần

Hướng dẫn sử dụng này chỉ được sử dụng cho Kim sinh thiết dùng một lần ENDO MASTER do ENDOVISION Co., Ltd sản xuất

Model No.	EMDF-10-17-17
	EMDF-10-23-20
	EMDF-20-17-17
	EMDF-20-23-20
	EMDF-11-17-17
	EMDF-11-23-20
	EMDF-21-17-17
	EMDF-21-23-20

1. Mục đích sử dụng

Kim sinh thiết dùng một lần là một dụng cụ sử dụng một lần được sử dụng để lấy mẫu mô trong quy trình nội soi

2. Chống chỉ định

Sản phẩm là một thiết bị y tế. Không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài Thiết bị Y tế

3. Cảnh báo

- 1) Xác nhận rằng hình ảnh nội soi rõ ràng trước khi sử dụng. Không đưa dụng cụ vào ống nội soi trừ khi bạn có trường nhìn rõ ràng. Việc chèn mà không có trường nhìn rõ ràng của nội soi có thể gây ra chấn thương cho bệnh nhân như thủng, xuất huyết hoặc màng nhầy. Thiết hại cho ống nội soi và / hoặc dụng cụ cũng có thể xảy ra
- 2) Sau khi lấy mẫu mô, các cốc kẹp phải được đẩy lại trong quá trình lấy ra khỏi nội soi. Nếu chưa đóng hoàn toàn, hãy kéo sản phẩm cho đến khi phần mở của ống nội soi và lấy cả sản phẩm và ống nội soi ra cùng một lúc

4. Những lưu ý khi sử dụng

- 1) Chỉ được phép sử dụng bởi bác sĩ có kỹ năng sử dụng sản phẩm để vận hành
- 2) Vì sản phẩm đã được tiệt trùng, không sử dụng nếu gói đã bị vỡ hoặc hư hỏng
- 3) Sản phẩm sử dụng một lần. Không sử dụng lại nó
- 4) Không sử dụng sản phẩm nếu đó là sản phẩm cũ

5. Chuẩn bị trước khi sử dụng

- 1) Sản phẩm được cung cấp dưới dạng tiệt trùng. Trước khi sử dụng, kiểm tra bao bì và không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào đã được đóng gói
- 2) Các bác sĩ phải hiểu biết cận kề về các chỉ định lâm sàng hoặc chống trùng hợp và kết hợp và chỉ sử dụng nó cho mục đích sử dụng
- 3) Kiểm tra việc sử dụng theo ngày trước khi sử dụng

6. Hướng dẫn sử dụng

- 1) Chèn kim sinh thiết có các cốc được đóng vào rãnh và mở các cốc và đưa thiết bị vào mô cần sinh thiết
- 2) Lấy mẫu mô bằng cách đóng cốc kẹp sinh thiết và nhẹ nhàng rút kẹp ra khỏi kênh

endovision
infinite vision of the medical device

ENDOVISION Co., Ltd. www.endovision.co.kr

Head office / 66-26, Dongnae-ro, Dong-gu,

Daegu, Rep.of Korea, 41061

T. +82.53.751.1955 F.+82.53.751.1964

Branch office / 108, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu,

Seoul, Rep.of Korea, 08506

T. +82.2.2135.7738 F.+82.2.2135.7738

E-mail: info@endovision.co.kr

Medical device



ENDO MASTER Disposable Biopsy Forceps

Chứng nhận số 18-4298

Nhóm sản phẩm: tế bào học, sử dụng một lần

7. Quản lý sau khi sử dụng

- 1) Sản phẩm này là thiết bị y tế sử dụng một lần. Không sử dụng lại
- 2) Vứt bỏ theo thực hành y tế được chấp nhận và các luật và quy định hiện hành.

8. Lưu trữ

Bảo quản tránh ánh nắng trực tiếp ở nhiệt độ phòng, nơi dễ thông gió

9. Để biết các dấu hiệu và ký hiệu, vui lòng xem bảng sau

Symbols	Description	Symbols	Description
	Do not re-sterilize		Temperature limit
	Do not re-use		Sterilized using ethylene oxide
	Consult instructions for use		Date of manufacture
	Caution: Read the Documents Enclosed		Use-by date
	Keep dry		Lot number
	Don't Use if Package is damaged and consult instruction for use		Manufacturer
	Keep away from sunlight		

Bản dịch tiếng việt này được thực hiện bởi:

CÔNG TY TNHH DYNAMED
 Giám Đốc
TNHH DYNAMED
 Vũ Thị Thu Nga