

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thành phần: Oxy già, Acid Salicylic, Ethanol, Nước.

Mục đích sử dụng: Sát khuẩn dụng cụ y tế, vết thương.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng bông gạc thấm dung dịch hoặc cho trực tiếp rồi vệ sinh vết thương hoặc sát khuẩn dụng cụ y tế.

Thận trọng: Không được tiêm. Không nhỏ vào khoang kín của cơ thể hoặc vào tai khi có thủng màng nhĩ.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Để xa tầm tay trẻ em

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Quy cách đóng gói: chai 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 100ml, 500ml, 1000ml. Hoặc theo nhu cầu thị trường


Sản xuất và sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH NINMED

Địa chỉ: xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ nhà máy: xóm 8, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Số lưu hành TBYT:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ

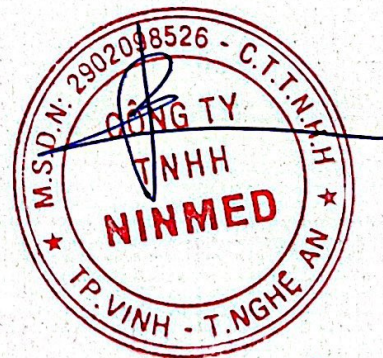

GIÁM ĐỐC
Nuyễn Công Ninh