

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TCA MK 80%

- 1. Yêu cầu chung:** Tài liệu này hướng dẫn sử dụng cho chủng loại sản phẩm TCA MK 80% do **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ M&K** là chủ sở hữu.
- 2. Công dụng:** Hỗ trợ làm giảm tình trạng mụn cóc tay chân, mụn cóc sinh dục (âm đạo, cổ tử cung, hậu môn và các vị trí vùng kín khác).
- 3. Tiêu chuẩn sản phẩm:** Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 35:2022/M&K.
- 4. Hướng dẫn sử dụng:** Dùng tăm bông chấm TCA MK 80% bôi lên mụn cóc 1 lần/ngày, rửa lại sau 1 giờ. Ngưng sử dụng khi mụn cóc chuyển sang trắng.
- 5. Cảnh báo an toàn:**
 - Không sử dụng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
 - Không điều trị nốt sùi tại lỗ tiêu.
 - Chỉ dùng ngoài.
 - Để xa tầm tay trẻ em.
 - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- 6. Bảo quản:** Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- 7. Vận chuyển:** Phương pháp vận chuyển phải đảm bảo duy trì được điều kiện bảo quản của trang thiết bị y tế.
- 8. Thông tin tra cứu:** Lô sản xuất, Ngày sản xuất: Xem trên nhãn bao bì của sản phẩm.
- 9. Thông tin liên hệ:** Xem trên nhãn bao bì của sản phẩm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Giám đốc



VŨ THỊ TUYẾT MAI