

Xịt xoang DR. Shabi Adusinus



Thành phần: Muối Natri clorid, dịch chiết kim giao, dịch chiết tỏi, dịch chiết hoa ngũ sắc, dịch chiết hoàng bá, dịch chiết tân di hoa, dịch chiết thượng nhĩ tử, dịch chiết bạch chỉ, dịch chiết Nga bắt thực thảo, Keo ong, Nước cất vừa đủ.

Nguyên lý hoạt động: Lắc nhẹ bình xịt, nhấn nút xịt, thiết bị xịt sẽ phun dung dịch vệ sinh vào sâu bên trong tai, khoang mũi, giúp vệ sinh sạch sẽ tai, khoang mũi, loại bỏ gỉ mũi, ráy tai chất nhày giúp mũi thông thoáng, dễ thở và tạo cảm giác mát dịu.

Công dụng:

- Hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm đa xoang, viêm xoang mãn tính, viêm xoang lâu năm, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính, ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi, chảy dịch mũi. Hỗ trợ điều trị đau đầu, nhức hốc mắt, nhức chân mày, nhức gò má do viêm xoang.
- Hỗ trợ giúp làm sạch ráy tai, rửa trôi dịch nhày, bụi bẩn trong mũi, giúp sát khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi, viêm VA.
- Giúp khoang mũi thông thoáng, dễ thở, giúp tai sạch sẽ.

Cách dùng: Lắc nhẹ lọ trước khi dùng. Với người viêm xoang, viêm mũi dị ứng: Trước khi xịt, rửa sạch mũi bằng nước muối sinh lý, ngứa mũi, xịt 1-2 lần vào mỗi bên mũi. Tiếp theo massage từ đầu cánh mũi đến ấn đường, ra hai chân mày. Ngày dùng từ 3-5 lần. Đối với viêm tai, rửa bằng nước muối sinh lý rồi xịt nhẹ vào mỗi bên tai. Sau đó thấm khô bằng bông. Ngày dùng 1-3 lần.

Đối tượng sử dụng:

- Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi.

Chống chỉ định: Người dùng quá mẫn cảm với các thành phần của dung dịch.

Bảo quản:

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- Sau khi sử dụng đậy kín nắp tránh làm nhiễm bẩn đầu xịt.

- Không tái sử dụng lọ và đầu xịt.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số CB:

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Công ty phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI.

Địa chỉ : Số 35 Phan Văn Hớn, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa,
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam.

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP

Địa chỉ: Lô 16-17-18, đường Nguyễn Như Quế, TDP Vân Quan, Phường Đa
Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.