

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: Xịt Xoang Mũi

Chủng loại/mũi sản phẩm: **Khánh Minh Gold**

1. THÀNH PHẦN

Thương nhĩ tử 5000mg, Tân di hou 5000mg, Tế tân 5000mg, Hoàng đằng 2000mg, Bạch chi 500mg, Menthol 200mg, Trinh nữ hoàng cung 200mg, Tinh dầu tràm 100mg, Thăng ma 100mg, Nga bất thực thảo 100mg, Eucalyptol 100mg, Cam thảo 50mg, Natri chloride 50mg, phụ liệu vừa đủ 30ml.

2. CÔNG DỤNG

- Giúp làm sạch, hỗ trợ rửa trôi dịch nhầy, bụi bẩn trong mũi.
- Hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng viêm xoang, viêm da xoang, viêm xoang mãn tính, viêm xoang lâu năm, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính, ngứa mũi, sổ mũi, hắt hơi, chảy dịch mũi, mù vàng hôi tanh.
- Hỗ trợ làm giảm đau đầu, nhức hốc mắt, nhức chân mày, nhức gò má do viêm xoang.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng

Xịt 2-3 nhíp / lần cho mỗi lỗ mũi , ngày dùng 2-3 lần / ngày . Có thể tăng số lần sử dụng mỗi ngày nếu viêm xoang mạn tính gây tắc nghẹt mũi nặng .

Cầm lọ theo phương thẳng đứng xịt thử vào không khí cho tới khi được làn sương mù đồng đều, hướng thẳng vào mũi xịt dứt khoát đồng thời hít nhẹ để dịch đi sâu vào trong khoang mũi.

Dùng xong vệ sinh nắp đậy đầu xịt.

Đối tượng sử dụng:

Trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn bị các chứng ngạt mũi, sổ mũi, viêm xoang, cảm cúm, dị ứng gây viêm mũi họng.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

- Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

7. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Biên