

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIMOM SCAR

Himom SCAR



Mô tả:

Himom Scar là miếng dán màu nâu vàng có kích thước 4x20 cm.

Thành phần:

Thành phần: gel silicon, sợi polyester, giấy chống dính polyethylen terephthalat.

Mục đích sử dụng:

Làm phẳng, thu hẹp và làm mờ các vết sẹo mổ, sẹo bỏng, sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo lan rộng, sẹo thâm, ...

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Rửa sạch và làm khô vùng sẹo.

Bước 2: Rửa sạch tay, cắt miếng dán theo hình dạng phù hợp với vết sẹo nhưng rộng thêm 1 – 2cm ở mỗi cạnh. Giữ phần chưa sử dụng trong túi ở nơi khô ráo.

Bước 3: Cẩn thận bóc lớp phim chống dính ra và dán phần chứa gel silicon lên vết sẹo. Lưu ý không kéo dẫn miếng dán.

Lưu ý: Nên sử dụng sản phẩm 4 giờ mỗi ngày trong 2 ngày đầu tiên. Tăng thời gian sử dụng lên 8 giờ mỗi ngày cho 2 ngày tiếp theo. Và tăng dần thêm 2 giờ sử dụng mỗi ngày cho những ngày kế tiếp, đến khi đạt tới ít nhất 12 giờ mỗi ngày. Nếu sử dụng Himom Scar liên tục trong 24 giờ thì sẽ đạt hiệu quả nhanh hơn. Trong trường hợp vận động nhiều thì nên cố định miếng dán bằng băng keo y tế.

Bước 4: Hàng ngày, gỡ miếng dán ra và rửa vết sẹo với xà bông hoặc sữa tắm dịu nhẹ (1-2 lần mỗi ngày), sau đó lau khô và dán lại (không cần thay miếng dán mới).

Chống chỉ định

Không sử dụng miếng dán Himom Scar trên mụn trứng cá, vết thương hở, còn tiết dịch hoặc chưa rút chỉ đối với chỉ không tiêu.

Cảnh báo và thận trọng:

- Lau khô trước khi dán
- Không dùng cùng với các sản phẩm chăm sóc da khác như mỹ phẩm, thuốc mỡ, kem dưỡng da, ...
- Ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu thấy phát ban, ngứa hoặc dị ứng.

Số lưu hành:

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, ở nhiệt độ phòng (1-30°C).

Chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam: Cty TNHH JW Healthcare Vietnam

Tầng 7, tòa nhà Saigon Finance Center, số 9 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà sản xuất: T&L Co., Ltd.

70-17, Wonam-ro, Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 456-812, Hàn Quốc.