



GẠC RƠ LƯỠI DIỆP AN NHÌ

Vệ sinh răng và nướu hàng ngày
Chống nấm miệng, tưa lưỡi

HỘP 30 GÓI



THÀNH PHẦN

Mỗi gạc mềm được tẩm dung dịch chứa:
Dịch chiết: Rau ngọt (Organic), Cúc la mã, Trà xanh; Keo ong; Xylitol;
Natri bicarbonat; Glycerin; Acid boric.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Từ trẻ sơ sinh trở lên.
Vệ sinh hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng kháng sinh hoặc thuốc giảm viêm chứa corticoid gây ức chế miễn dịch.
Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng. Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

CÁCH DÙNG

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi sử dụng.
- Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc.
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và 2 phần bên má.
- + Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Nên vệ sinh hàng ngày cho bé.
- Đối với trẻ đang bị tưa lưỡi: Lau nhẹ nhàng lên lưỡi bé, nên dùng 3 lần/ngày.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu cho bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng chưa biết đánh răng: Nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: Buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Đối với người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng: Người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người lớn. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho 1 lần vệ sinh.



GẠC RƠ LƯỠI DIỆP AN NHÌ

Vệ sinh răng và nướu hàng ngày
Chống nấm miệng, tưa lưỡi

HỘP 30 GÓI



GẠC RƠ LƯỠI DIỆP AN NHÌ

CÔNG DỤNG:

Vệ sinh hàng ngày cho trẻ làm sạch lưỡi, nướu, răng và khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên:
+ Giúp phòng chống những bệnh về răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu,...)
+ Giúp nướu khỏe, xoa dịu và làm giảm triệu chứng đau nướu khó chịu trong thời kỳ trẻ mọc răng.
+ Giúp chống sâu răng, hôi miệng.

Lưu ý khi sử dụng:

- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Sản phẩm nên sử dụng ngay khi mở bao gói.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C.
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.




Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm:
Công ty Cổ phần Được Khoa
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số văn khách hàng: 1800 59 99 77
Website: <https://diepannhi.vn>




Số công bố:
Tiêu chuẩn: TCCS.
Số lô SX:
Ngày SX:
Hạn dùng:



Túi: 60x80mm

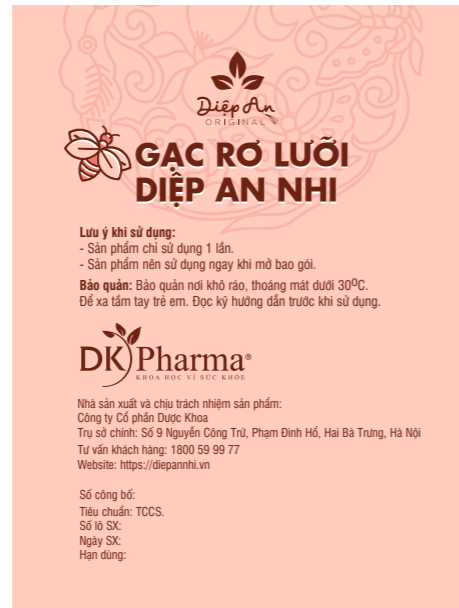



GẠC RƠ LƯỖI DIỆP AN NHI

Vệ sinh răng và nướu hàng ngày Chống nấm miệng, tưa lưỡi



THÀNH PHẦN:
Mỗi gạc mềm được tẩm dung dịch chứa:
Dịch chiết: Rau ngót (Organic), Cúc la mã, Trà xanh; Keo ong; Xylitol; Natri bicarbonat; Glycerin; Acid boric.

Trong đó:
Rau ngót đã được sử dụng trong dân gian từ lâu, giúp điều trị tưa lưỡi hiệu quả.
Cúc la mã tác dụng chống viêm và làm giảm cảm đau hiệu quả, đặc biệt trong trường hợp khi trẻ mọc răng.
Tinh chất trà xanh giúp hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám, cặn sữa trong khoang miệng của trẻ.
Phòng chống sâu răng trong các trường hợp trẻ bắt đầu mọc răng.
Keo ong, một loại kháng sinh tự nhiên, giúp sát khuẩn, chống viêm tốt tại các tế bào bị tổn thương, kích thích tạo tế bào mới.
Natri bicarbonat là muối kiềm có hoạt tính diệt khuẩn và kháng nấm hiệu quả, phòng tưa lưỡi, nấm lưỡi.
Xylitol là một loại đường lên men tự nhiên, giúp giảm thiểu, hạn chế vi khuẩn, loại bỏ mảng bám, đồng thời giảm nguy cơ sâu răng.

CÔNG DỤNG:
Vệ sinh hằng ngày cho trẻ làm sạch lưỡi, nướu, răng và khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên:
+ Giúp phòng chống những bệnh về răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu,...).
+ Giúp nướu khỏe, xoa dịu và làm giảm triệu chứng đau nướu khó chịu trong thời kỳ trẻ mọc răng.
+ Giúp chống sâu răng, hôi miệng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
- Từ trẻ sơ sinh trở lên.
- Vệ sinh hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải dùng khí dung hoặc thuốc giảm viêm chứa corticoid gây ức chế miễn dịch.
- Trẻ đang trong thời kì chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
- Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh miệng và đánh răng hàng ngày.
- Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.

CÁCH DÙNG
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi sử dụng.




- Cho nhẹ ngón tay vào miệng gạc.
- + Lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và 2 phần bên má.
- + Sử dụng ngay sau khi mở và không sử dụng lại.
- Nên vệ sinh hàng ngày cho bé.
- Đối với trẻ đang bị tưa lưỡi: Lau nhẹ nhàng lên lưỡi bé, nên dùng 3 lần/ngày.
- Đối với trẻ đang mọc răng: Khi trẻ đau nhức khi mọc răng, mẹ có thể đeo gạc và xoa nhẹ nơi nướu đang sưng để giảm cảm giác khó chịu cho bé.
- Đối với trẻ đã mọc răng chưa biết đánh răng: Nên vệ sinh đều đặn ngày 2 lần: Buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
- Đối với người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng: Người chăm sóc đeo gạc và vệ sinh răng, lợi, miệng của người lớn. Có thể dùng nhiều miếng gạc cho 1 lần vệ sinh.

Lưu ý khi sử dụng:
- Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
- Sản phẩm nên sử dụng ngay khi mở bao gói.

Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS.
Số lô SX, ngày SX, hạn dùng: In trên gói.
Số công bố:



Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm:
Công ty Cổ phần Dược Khoa
Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tư vấn khách hàng: 1800 59 99 77
Website: <https://diepannhi.vn>