

MẪU NHÃN HỘP GEL MỜ SẸO - HINZUCAR

Hộp của Tuýp 10g



MẪU NHÃN GEL MỠ SẸO - HINZUCAR

Tuýp 10g



Thành phần:

Cyclomethicone, cyclopentasiloxane, dimethicone crosspolymer, cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, centella asiatica extract (Dịch chiết rau má), tocopheryl acetate, nano bạc, nước tinh khiết, glycosaminoglycans.

Công dụng, liều lượng - cách dùng & các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Ở nhiệt độ thường, để nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em.

Quy cách: Tuýp 10g. Hộp 1 tuýp. Số:



Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - P. Mỹ Phước - Tx. Bến Cát - T. Bình Dương

GEL MỠ SẸO

HINZUCAR

10g

ENLIE PHARMA

MẪU NHÃN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HINZUCAR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GEL MỜ SẸO

HINZUCAR

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Tuýp 5g, 10g, 20g, 25g, 30g.

THÀNH PHẦN:

Cyclomethicone, cyclopentasiloxane, dimethicone crosspolymer, cetyl PEG/ PPG-10/ 1 dimethicone, centella asiatica extract (Dịch chiết rau má), tocopheryl acetate, nano bạc, nước tinh khiết, glycosaminoglycans.

CÔNG DỤNG:

- Bôi ngoài da tạo một rào chắn với chức năng làm cô đọng để làm lành ban đầu vết thương, cải thiện làm mờ vết sẹo cũ, sẹo lồi... làm mờ vết nhăn và vết thâm do mụn trứng cá, côn trùng đốt.
- Hỗ trợ ngừa sẹo mới do tai nạn, xây xát, phẫu thuật, bỏng...
- Giữ ẩm cho da hết nứt nẻ, cải thiện vết chai sần, khô nứt gót.

CÁCH DÙNG:

- Sau khi làm sạch vùng da cần sử dụng, vỗ nhẹ và làm khô da, bôi một lượng cỡ hạt đậu vào đầu sẹo và nhẹ nhàng trải rộng thành lớp mỏng trên toàn bộ vùng da này theo một hướng. Không cần xoa vào da.
- Để khô khoảng 1 - 2 phút. Một khi đã khô, bạn có thể che chắn vùng da này bằng cách trang điểm hoặc dùng kem chống nắng nếu cần.
- Bôi sản phẩm tối thiểu 2 lần/ ngày.
- Để bảo vệ da, chống lại sự hình thành sẹo, nên sử dụng sản phẩm một khi vết thương đã đóng kín.

CẢNH BÁO THẬN TRỌNG:

- Để xa tầm tay trẻ em
- Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng được in trên bao bì.
- Không nên dùng sản phẩm cho vết thương hở hoặc còn ướt.
- Không nên để sản phẩm dính vào màng nháy, niêm mạc hoặc bôi quá gần mắt, tra mắt.
- Không nên dùng sản phẩm để bôi da đồng thời cùng các chế phẩm khác mà không có ý kiến của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

- Bảo quản ở nhiệt độ thường, để nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em.

HẠN SỬ DỤNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE
Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - P. Mỹ Phước
Tx. Bến Cát - T. Bình Dương.

