

Số: 10/2022/HDSĐ-DP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN SOI DA

1. Mục đích sử dụng:

- Sản phẩm được sử dụng soi da, hỗ trợ điều trị da, chăm sóc da dùng trong y tế, thẩm mỹ.

2. Hướng dẫn sử dụng

Hãy đảm bảo thiết bị được đặt ở vị trí an toàn và cầm chắc chắn đầu soi trước khi thực hiện các bước sau.

- Bước 1: Tiến hành cắm đầu sạc điện vào ổ điện. Cần lưu ý thiết bị không phải là sản phẩm tích điện nên bất cứ khi nào cần sử dụng mọi người đều cần phải cắm vào ổ điện.
- Bước 2: Ấn nút nguồn để mở máy.
- Bước 3: Sử dụng các nút điều khiển với chú thích chức năng theo thứ tự như đã nêu ở trên.
- Bước 4: Từ từ đưa máy đến vùng da cần soi và bắt đầu soi từng chi tiết, đánh giá tình trạng.
- Bước 5: Lưu lại thông tin làn da để tiến hành phân tích, đánh giá và đưa ra biện pháp trị liệu cho các vấn đề về da của người bệnh.

3. Vệ sinh và bảo dưỡng:

- Sau mỗi lần soi da cần vệ sinh máy sạch sẽ, không để vi khuẩn bám lại trên máy.
- Trước khi thực hiện tốt nhất hãy rửa sạch mặt trước. Hoặc đơn giản dùng khăn ẩm lau khô qua để có thể tăng độ chính xác khi soi.
- Cần bảo quản máy soi da ở nơi khô ráo, không được để ánh sáng trực tiếp chiếu vào.

4. Cảnh báo và thận trọng

- Để đạt được hiệu quả tốt, bảo vệ máy và làn da thì mọi người cần lưu ý một vài điều sau:



- Không nên để đầu soi nằm trực tiếp xuống bàn hay các mặt phẳng khác. Thay vào đó sau mỗi lần dùng xong hãy đặt thiết bị này vào đế được trang bị sẵn. Điều này sẽ giúp hạn chế việc đầu máy bị bẩn gây hại cho da và quá trình soi không được chính xác.
- Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguồn điện, không ngắt ngang khi đang dùng.
- Sau mỗi lần soi da cần vệ sinh máy sạch sẽ, không để vi khuẩn bám lại trên máy.
- Trước khi thực hiện tốt nhất hãy rửa sạch mặt trước. Hoặc đơn giản dùng khăn ẩm lau khô qua để có thể tăng độ chính xác khi soi.
- Cần bảo quản máy soi da ở nơi khô ráo, không được để ánh sáng trực tiếp chiếu vào.
- Trước khi dùng nên vệ sinh thiết bị để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh, gây nhám lẫn da không sạch.

6. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Tránh xa tầm tay trẻ em.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Bích Tuyên