

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HERBLAND

Địa chỉ: 83/20/19 Đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GẠC RĂNG MIỆNG

Model: Kiddy care

**THÀNH PHẦN:** NaCl, NaHCO<sub>3</sub>, Xylitol, Keo ong, Chiết xuất lá hẹ (Allium odorun Extract), Chiết xuất cỏ ngọt (Stevia leaf extract).

**CÔNG DỤNG:** Vệ sinh hàng ngày giúp làm sạch lưỡi nướu, loại bỏ tối đa các mảng bám do vi khuẩn, vi nấm trong khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng miệng giúp phòng chống những bệnh như: nấm miệng, tưa lưỡi, trắng lưỡi, viêm nướu..., giúp nướu khỏe mạnh trong thời kì trẻ mọc răng, giúp chống sâu răng.

### ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ sơ sinh
- Trẻ uống sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm
- Trẻ đang trong thời kì chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng
- Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh răng miệng và đánh răng hàng ngày

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Mỗi gói chỉ sử dụng 1 lần
- Dùng ít nhất 2 lần/ngày. Nếu bé đang mắc các bệnh về răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi) thì nên dùng 3 lần/ngày.

- Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi sử dụng.

- Xò gạc vào ngón tay trỏ và lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và 2 bên trong má của bé.

Lưu ý: Sau khi sử dụng cho vào túi rác, không cho vào cống nước hoặc nhà vệ sinh để gây tắc.

### BẢO QUẢN:

- Để xa tầm tay trẻ em
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30 độ C.
- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**QUY CÁCH:** 1 hộp chứa 30 gói

**TIÊU CHUẨN:** TCCS 01:2022/HL

**Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:**

CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ

ĐC: BT 1.1, Khu Đô Thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam



Ngày 21 tháng 10 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

*ĐS. Nguyễn Đăng Tuyển*