

GẠC RĂNG MIỆNG

Kiddy care

Làm sạch và bảo vệ răng miệng bé



Hộp 30 gói Made in Vietnam

Herbland Pharma

BỘ Y TẾ THƯƠNG THIẾT BỊ Y TẾ

Herbland Pharma

Gạc đã được hấp, sấy diệt khuẩn và tẩm ẩm các thành phần trước khi đóng gói riêng biệt, tiện lợi sử dụng.

Gạc được làm bằng chất liệu sợi Polyester mềm mại, không vương sợi bông.

THÀNH PHẦN: Mỗi gạc mềm được tẩm ẩm bởi: NaCl, NaHCO₃, Xylitol, Kao ong, Cỏ ngọt, Dịch chiết lá hẹ (Allium odorum Extract).

NaCl NaHCO₃ Xylitol

CÔNG DỤNG:

Vệ sinh hàng ngày giúp làm sạch lưỡi nướu, loại bỏ tối đa các mảng bám do vi khuẩn, vì nằm trong khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh trở lên. Tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng miệng giúp phòng chống những bệnh như: nấm miệng, tưa lưỡi, trắng lưỡi, viêm nướu... giúp nướu khỏe mạnh trong thời kỳ trẻ mọc răng, giúp chống sâu răng.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG:

- Trẻ sơ sinh.
- Trẻ uống sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm.
- Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
- Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh răng miệng và đánh răng hàng ngày.

Hộp 30 gói



Kiddy care

Herbland Pharma

BỘ Y TẾ THƯƠNG THIẾT BỊ Y TẾ

Herbland Pharma

CÁCH DÙNG:

- Mỗi gói chỉ sử dụng 1 lần.
- Dùng ít nhất 2 lần/ngày. Nếu bé đang mắc các bệnh về răng miệng (trám miệng, tưa lưỡi) thì nên dùng 3 lần/ngày.

Buổi sáng Buổi trưa Buổi tối

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi sử dụng.
- Xò gạc vào ngón tay trỏ và lau nhẹ nhàng lên nướu, lưỡi, răng và 2 bên trong má của bé.
- Lưu ý: Sau khi sử dụng cho vào túi rác, không cho vào cống nước hoặc nhà vệ sinh để gây ô nhiễm.

BẢO QUẢN:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số DK :
Số kê SX :
HSD :

GRAND STAR
Sinh xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ
ĐC: 671-1, Khu 05 Vũ Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Sinh phẩm bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HERBLAND
Số: 0302/19 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

歯科力一ゼ

Kiddy care

Làm sạch và bảo vệ răng miệng bé



Herbland Pharma

BỘ Y TẾ THƯƠNG THIẾT BỊ Y TẾ

歯科力一ゼ

Kiddy care

赤ちゃんの歯をきれいに保護する。



Herbland Pharma

BỘ Y TẾ THƯƠNG THIẾT BỊ Y TẾ

Số DK :
Số kê SX :
HSD :

145x60x90mm

55x75mm