




MẪU NHÃN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

GIÁM ĐỐC
Đặng Kim Ngật

Tên TTBYT:	:	Kính áp tròng
Chủng loại/ Mã sản phẩm	:	Xem trên bao bì
Số lưu hành	:	XXXXXXXXXXXXXX
Hướng dẫn sử dụng	:	Bước 1: Rửa sạch tay bằng nước sạch và lau khô bằng khăn. Bước 2: Đặt kính lên đầu ngón tay và đưa lên song song với tầm mắt. Bước 3: Dùng tay còn lại để vén mi lên đồng thời từ từ đặt kính vào đồng từ mắt. Bước 4: Nhắm mắt lại và chớp nhẹ vài lần Nếu có cảm giác khó chịu, hãy tháo kính ra và thực hiện lại Bước 1.
Chủ sở hữu số lưu hành	:	CÔNG TY TNHH MELOOK
Địa chỉ	:	131/7 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ sở hữu thiết bị y tế	:	Joowon Innovation Co., Ltd
Nhà sản xuất	:	Xem trên bao bì
Địa chỉ	:	Xem trên bao bì
Xuất xứ	:	Xem trên bao bì
Ngày sản xuất	:	Xem trên bao bì
Hạn sử dụng	:	(Xem ) trên bao bì sản phẩm