

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên sản phẩm:** Kính áp tròng

**Model:** Sere, Navid, Multi, Klare

Bước 1: Rửa sạch tay bằng nước sạch và lau khô bằng khăn.

Bước 2: Đặt kính lên đầu ngón tay và đưa lên song song với tầm mắt.

Bước 3: Dùng tay còn lại để vén mi lên đồng thời từ từ đặt kính vào đồng từ mắt.

Bước 4: Nhắm mắt lại và chớp nhẹ vài lần

Nếu có cảm giác khó chịu, hãy tháo kính ra và thực hiện lại Bước 1.

### **Chống chỉ định:**

Tránh sử dụng khi có các bệnh về mắt

### **Cảnh báo và thận trọng:**

Tránh tự vệ sinh và tái sử dụng khi hết hạn sử dụng.

Sử dụng nước mắt nhân tạo để giữ ẩm cho mắt

Không được đeo kính áp tròng trong khi ngủ

**Hãng sản xuất:** Joowon Innovation Co., Ltd

**Địa chỉ:** 44, Sureteo 1-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea

**Nhập khẩu và phân phối:** CÔNG TY TNHH MELOOK

**Địa chỉ:** 131/7 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Đặng Kim Ngân**