


Hướng dẫn sử dụng

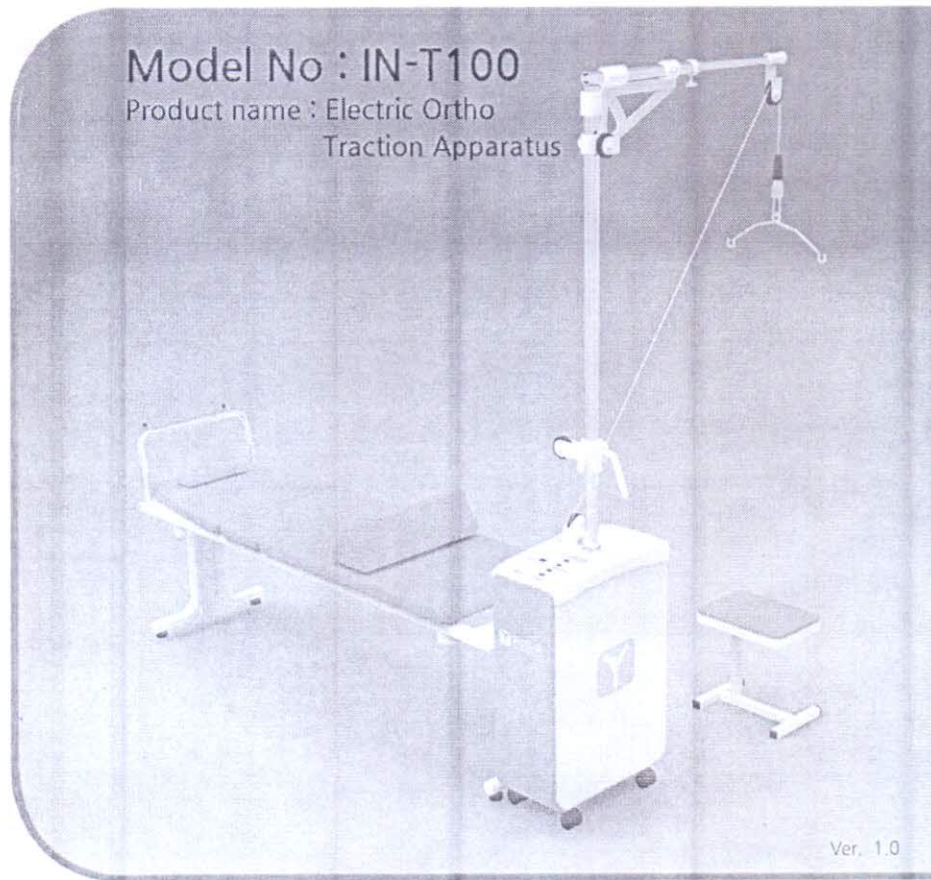

Vui lòng đọc hướng dẫn kỹ trước khi sử dụng



Tên và vai trò mỗi bộ phận

Bảng điều khiển

Vùng hiển thị trạng thái chuyển động được cài đặt trước

Nút chỉnh trọng lượng
-A button which enables to select "Holdweight" function to setup HFweight (operation is made with encoder)

Nút chỉnh thời gian
Nhấn để tăng hoặc giảm thời gian.

Nút thời gian
Nút chọn thời gian điều khiển được cài đặt với nút vặn điều khiển.

Vùng hiển thị 4 chế độ hoạt động

Nút chọn chế độ

Nút nguồn

Nút Bật / tắt chế độ làm ấm giường

Nút mã hóa
Cho phép điều khiển các chức năng tăng giảm thời gian, trọng lượng, giá trị cài đặt. Nó có chức năng khởi động / dừng.

Nút thời gian nghỉ Tăng / giảm thời gian nghỉ.


Nút trọng lượng nghỉ
Nút cài đặt trọng lượng nghỉ bằng cách vặn nút mã hóa

START/STOP Nút

Tên và vai trò mỗi bộ phận




Điều trị thắt lưng

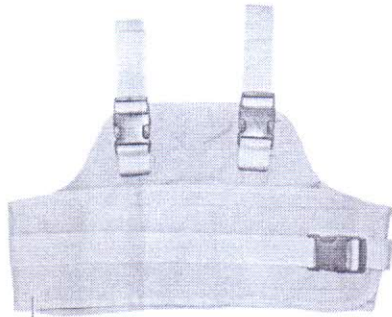

Đai ngực

Được mặc ở ngực cho việc kéo thắt lưng và được cố định trên giường

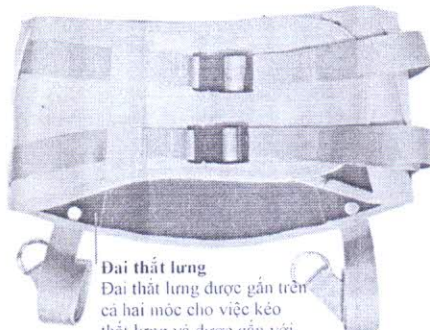

Đai thắt lưng

Đai thắt lưng được gắn trên cả hai móc cho việc kéo thắt lưng và được gắn với dây của máy chính.



Móc của thắt lưng


Móc này được gắn để kéo thắt lưng với dây kéo của thân máy chính

Điều trị đốt sống cổ



Móc dùng cho kéo đốt sống cổ

Dây đai được gắn vào móc và gắn vào dây kéo của máy chính để kéo đốt sống cổ

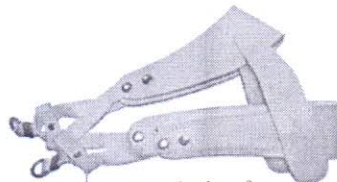

Đai đốt sống cổ


Đai được gắn chặt ở cổ và đầu của bệnh nhân.



Ghế



Kiểm tra điện 220V!

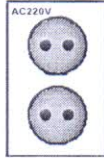


Kiểm tra đúng nguồn điện cung cấp. Cắm dây nguồn chắc chắn..




Kiểm tra công tắc đã tắt trước khi cắm nguồn

Khóa móc trượt

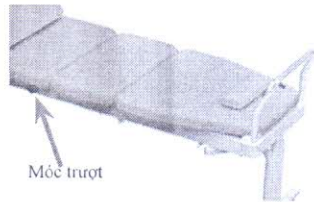

Khóa móc trượt bên dưới nệm giường. Nó nguy hiểm khi đặt bệnh nhân trên nệm trượt.

Kiểm tra phụ kiện và dây

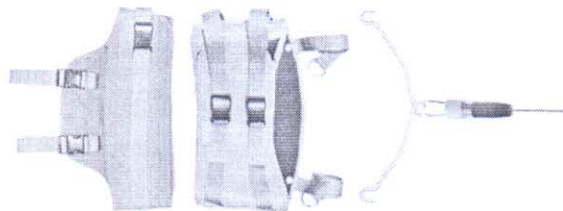


Sau khi đặt đai ngực và đai thắt lưng lên giường và để bệnh nhân lên đó để cố định cơ thể.
Nên được chuẩn bị sau khi đai ngực được cố định trên giường và đai thắt lưng được gắn trên móc.
Chuẩn bị điều chỉnh độ cao của ròng rọc vào chiều cao của thắt lưng bệnh nhân, cố định dây từ máy chỉnh tới ròng rọc giữa và gắn đầu cuối của dây vào móc cho thắt lưng.

Kiểm tra dây!

Kiểm tra nếu dây chạm tới bất kỳ phần nào khi di chuyển.
Nếu ma sát phát sinh liên tục gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của dây.



Điều chỉnh hướng của cụm 3 chân!

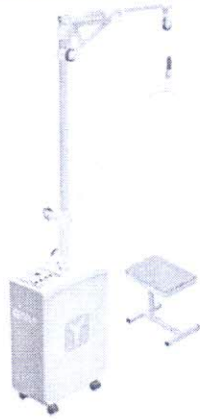


Vui lòng quay hướng của tripod cluster qua bên hông của máy chính và đặt ghế thêm tới hướng đó.




Hoặc đặt tripod cluster hướng ngược lại với giường và đặt ghế thêm vào hướng đó.

Điều chỉnh chiều dài của cụm 3 chân!

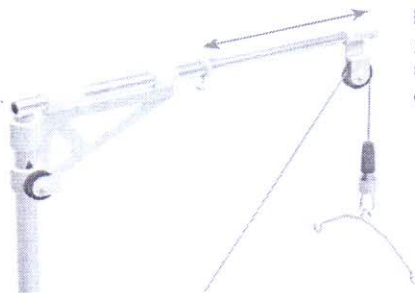

Điều chỉnh chiều dài thanh điều khiển của Tripod cluster.
Kéo dây từ thân máy chính gắn vào móc trong cái ròng rọc của thanh điều khiển.
Gắn móc vào trong kẹp dây.

Mang dây đai cổ!

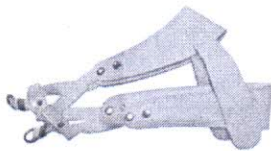

Sau khi một bệnh nhân ngồi vào ghế, đeo dây đai cổ chặt.
Chuẩn bị kết nối đầu cuối của dây đai cổ với móc.

Kiểm tra dây!

Kiểm tra dây xem dây có bị kẹt khi di chuyển. Nếu sự ma sát xảy ra liên tục sẽ làm giảm tuổi thọ của dây.