

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ÁO CHOÀNG CÁCH LY Y TẾ

Sản phẩm áo choàng cách ly y tế trong phòng mổ, sau khi tiệt trùng, dùng để ngăn cách vùng phẫu trường và người của phẫu thuật viên, bảo đảm vô trùng, bảo vệ cho bệnh nhân và phẫu thuật viên trong ca phẫu thuật. Hướng dẫn sử dụng cụ thể như sau:

Bước 1: Mở bao bì và giấy gói áo. Lau khô tay bằng hai khăn thấm. Luồn hai tay vào bên trong hai cánh của áo phẫu thuật

Bước 2: Giữ áo thật chắc. Bung áo ra, luồn tay vào cánh tay áo

Bước 3: Người phụ tá luồn hai tay vào bên trong áo và kéo lên. Sau đó, cột hai dây áo phía sau lại. Cài gai dán cho áo thật ngay ngắn

Bước 4: Phẫu thuật viên mang găng tay phẫu thuật. Rồi rút một dây áo ở phía trước bụng, phần còn lại đưa cho người phụ tá. Người phụ tá cầm miếng carton cài dây áo đưa về phía phẫu thuật viên, phẫu thuật viên rút dây áo còn lại và cột chặt chúng lại với nhau.