

MÁY CHIẾU BIỂU ĐỒ THỬ THỊ LỰC

Model SSC-370

Hãng SX: Nidek

Hướng Dẫn Sử Dụng

Khi **MÁY CHIẾU BIỂU ĐỒ THỬ THỊ LỰC** được sử dụng các bước bật và tắt máy được tuân theo sự hướng dẫn sau.

Việc bật hoặc tắt máy không đúng quy trình có thể gây hư hỏng thiết bị.

Bật máy

1. Kiểm tra dây cắm điện vào máy,
↓ mở nguồn điện bằng công tắc phía dưới máy
2. Kiểm tra tư thế ngồi của bệnh nhân (tăng giảm chiều cao bằng ghế khám TC-800 tùy theo chiều cao của bệnh nhân)
↓
3. Đo lần lượt từng mắt và sau đó là
↓ cả hai mắt.
4. Chọn loại chức năng đo
5. Tắt đèn của máy khi không đo bằng nút lamp trên bộ điều khiển từ xa.

Tắt máy

1. Tắt đèn của máy bằng cách nhấn vào nút lamp trên bộ điều khiển từ xa.
↓
2. Tắt công tắt máy.

! CẢNH BÁO

- o Luôn luôn thực hiện đúng theo các trình tự bật và tắt máy.

❖ Nếu trong quá trình sử dụng có gặp sự cố, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng kỹ thuật
- 028. 62908200

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC

WARUT PANGPOMMA