

## BẢN NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

Cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHÚ

Địa chỉ: Số 6 ngách 91/16 ngõ 91 đường Trần Duy Hưng, phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

MST: 0106040958.

Nội dung hướng dẫn sử dụng tiếng Việt như sau:

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Gel ưa nước

**Healit**

Nhà sản xuất: VH Pharma a.s.

Thúc đẩy nhanh quá trình lành thương hở



# Healit

### ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG NHANH VÀ TIỆN LỢI

Healit là sản phẩm dùng điều trị các vết thương hở cấp tính và mạn tính (các vết rách, trầy xước da, nứt môi, nứt núm vú, nứt kẽ hậu môn, vết bỏng, vết thương hoại tử do tắc mạch, vết loét mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường, loét do tỳ đè, vết thương hậu phẫu) và những tổn thương tương tự. Healit cân bằng độ ẩm trên vết thương - điều kiện chính để thúc đẩy nhanh quá trình lành thương và chống hình thành sẹo. Healit là sản phẩm đã được tiệt trùng.

Healit là Gel ưa nước Methacrylate dựa trên phản ứng đồng trùng hợp Copolymer cấu trúc hình lưới 2-Hydroxyethylmethacrylate có chứa các nhóm axit amin được bảo vệ trong môi trường liên kết không gian polymer, được phát minh bởi Phân viện Hóa cao phân tử thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Cộng Hòa Séc.

### NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HEALIT TRONG ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG HỞ:

- Hút các tiết tố trên vết thương, hỗ trợ làm sạch vết thương.
- Nhóm các gốc oxy tự do trên vết thương - được tạo ra trong quá trình viêm nhiễm.
- Tạo pH tối ưu và nhiệt độ ổn định trên vết thương - điều kiện thiết yếu cho vết thương mau lành.
- Cân bằng độ ẩm cho vết thương - giảm đau do vết thương không bị khô (gây co kéo và đau).
- Tối ưu hóa độ ẩm khiến bề mặt vết thương không bị đóng vảy, tránh việc hình thành sẹo lồi lõm.

**THÀNH PHẦN:** Copolymer of 2-hydroxyethylmethacrylate: 10%, Macrogol 300: 46%, Nước tinh khiết: 44%

### CÁCH DÙNG:

- Rửa sạch các tạp chất cơ học trên vết thương (bụi bẩn, dư lượng của các loại chế phẩm điều trị khác).
- Dùng đầu nhọn trên nắp đậy thùng đầu tuýp.
- Bôi một lớp Gel mỏng (khoảng 1mm) trên toàn bộ bề mặt vết thương (bôi rộng ra ngoài vết thương một khoảng nhỏ), sau khi bôi, Gel sẽ bám vào vết thương, trương nở và bắt đầu hút dịch tiết ra từ vết thương.
- Nếu cần thiết, có thể dùng loại băng gạc không thấm nước để che phủ lên bề mặt vết thương sau khi đã bôi Gel, sau đó mới băng bó lại bằng các loại gạc thông thường, các loại gạc này phải rộng hơn vết thương khoảng 1cm, nên theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị nếu bệnh nhân cần thiết phải dùng các loại băng đặc biệt.
- Tác dụng của Gel được thấy qua việc sau khi bôi, Gel sẽ thấm hút dịch và trương nở, do công nghệ bào chế đặc biệt nên Gel sẽ không dính chặt vào bề mặt vết thương, có thể dễ dàng lau nhẹ hoặc rửa sạch lớp Gel đã bôi bằng nước sạch, không gây đau cho bệnh nhân mỗi khi làm vệ sinh (thay băng).
- Sau thời gian từ 12 - 48 tiếng, tùy theo tình trạng vết thương và lớp Gel trên bề mặt, hoặc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cần thiết bôi lớp Gel mới và thay băng. Đối với các vết thương hoại tử có thể bôi lớp Gel mới và thay băng sau thời gian 72 tiếng.

### LƯU Ý:

Theo các kết quả lâm sàng, môi trường ẩm trên bề mặt vết thương rút ngắn thời gian lành thương, hỗ trợ quá trình phân bào và di chuyển của các tế bào hạt trên bề mặt vết thương. Dưới lớp Gel nhiệt độ và pH trên vết

## CÔNG TY TNHH XNK TỔNG HỢP NAM PHÚ.

Trụ sở: Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại: 024.66879777 Email: Napeximco@gmail.com.

# NAPEXIMCO

Let's make your success

thương được giữ ổn định, giúp quá trình lành thương tốt và nhanh hơn. Đối với việc điều trị các vết thương phức tạp và bội nhiễm, cần giữ đúng các phác đồ điều trị khác (giữ đúng chế độ dinh dưỡng, chế độ vệ sinh vết thương và chế độ điều trị các biến chứng khác).

### CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Trong quá trình điều trị bằng **Healit** không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào như dị ứng, kích thích da, gây đau đớn. Đối với bệnh nhân có độ mẫn cảm cao có thể sẽ gây ra phản ứng hơi ngứa, nhưng đây không phải là những phản ứng có hại.

Trong trường hợp có những biểu hiện không mong muốn (như gây đau, mẩn đỏ,...) nên dừng việc điều trị bằng **Healit** và báo cho bác sĩ điều trị biết.

Để xa tầm tay trẻ em, không dùng để bôi trong, không dùng sau khi sản phẩm đã quá hạn sử dụng ghi trên vỏ tuýp. Trong trường hợp sử dụng Gel **Healit** lên đầu núm vú phụ nữ đang cho con bú, cần phải làm sạch lớp Gel trước khi cho con bú.

### BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nhiệt độ 15-25°C.

### ĐÓNG GÓI:

Hộp 1 tuýp 5 g gel, 15 g gel, 30 g gel, 100 g gel.

### NHÀ SẢN XUẤT:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Cộng Hòa Séc.

Hà Nội, Ngày 20 tháng 10 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC  
*Trần Văn Nghĩa*

