

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: **Dung dịch vệ sinh mũi**

Chủng loại/mã sản phẩm: **Seamar adult**

1. THÀNH PHẦN

Chlorhexidine digluconate 20%, Cetylpyridine chloride, Chiết xuất Keo ong, NaCL, EDTA, PEG 1500, Tween 20, Ethanol, Camphor, Tinh dầu Đại bi, Tinh dầu Đinh hương, Nước RO.

2. CÔNG DỤNG

Giúp vệ sinh, làm sạch mũi, làm loãng dịch nhầy, lấy đi các chất bẩn trong mũi, giúp mũi thông thoáng dễ thở và duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi. Hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng: sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, viêm mũi dị ứng, khô rát mũi... Bảo vệ và phục hồi niêm mạc mũi bị kích ứng.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cách dùng:

- Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.
- Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi.
- Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần.
- Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.

Đối tượng sử dụng:

- Vệ sinh, làm sạch mũi hàng ngày, sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi, dịch bệnh...
- Người bị sổ mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, tắc mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang...
- Dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi
- Dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú
- Sản phẩm an toàn khi dùng lâu dài

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không sử dụng với người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

5. BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

6. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, Ngày 05 tháng 9 năm 2022

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
TNHH
DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
VŨ PHẠM
H. PHỤ YÊN
P. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Huệ