



kt: 50 x 50 x 160

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

100% NATURAL

ISSC ISO 22445:2016

- Chlorhexidine digluconate 20%
- Cetylpyridine chloride
- Chiết xuất Keo ong

SEA WATER

Vệ sinh khoang mũi  
Phòng ngừa sổ mũi

Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chai 75ml

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

**THÀNH PHẦN :**

Chlorhexidine digluconate 20%, Cetylpyridine chloride, Chiết xuất Keo ong, NaCl, EDTA, PEG 1500, Tween 20, Ethanol, Camphor, Tinh dầu Đại bi, Tinh dầu Đinh hương, Nước RO.

**CÔNG DỤNG :**

Giúp vệ sinh, làm sạch mũi, làm loãng dịch nhầy, lấy đi các chất bẩn trong mũi, giúp mũi thông thoáng dễ thở và duy trì độ ẩm tự nhiên cho mũi. Hỗ trợ ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng: sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, viêm mũi dị ứng, khô rát mũi... Bảo vệ và phục hồi niêm mạc mũi bị kích ứng.

**CÁCH DÙNG:**

- Mở nắp đầu xịt, cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, xịt vào không khí 1-2 nhát để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt.
- Hướng đầu xịt thẳng vào mũi, hơi ngửa cổ ra sau, nhấn đầu xịt, hít nhẹ để dung dịch đi sâu vào khoang mũi.
- Xịt mỗi bên mũi 1-2 xịt/lần, mỗi ngày 3-4 lần.
- Dùng xong vệ sinh và đậy nắp đầu xịt.

mã vạch

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

100% NATURAL

ISSC ISO 22445:2016

- Chlorhexidine digluconate 20%
- Cetylpyridine chloride
- Chiết xuất Keo ong

SEA WATER

Vệ sinh khoang mũi  
Phòng ngừa sổ mũi

Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chai 75ml

Dung dịch vệ sinh mũi  
**Seamar Adult**

**ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:**

- Vệ sinh, làm sạch mũi hàng ngày, sau khi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, khói bụi, dịch bệnh...
  - Người bị sổ mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, tắc mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang...
  - Dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi
  - Dùng được cho phụ nữ mang thai và cho con bú
  - Sản phẩm an toàn khi dùng lâu dài
- Chống chỉ định:**  
Không sử dụng với người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

**Tiêu chuẩn áp dụng:**

**TCCS 02:2022/FS-VUPHAM**

**CBSP :**

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối:

**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VŨ PHẠM**

Địa chỉ: Thôn Trì Chi, Xã Trì Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Số điện thoại: 02466869597

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI**

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Cụm CN và Tiểu thủ CN Ngọc Hòa, thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

LSX:

NSX:

HSD:

