



CÔNG TY TNHH TM TBYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

Email : htpmedical@hoangthinhphat.vn - htpmedical@gmail.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐÈN KHÁM Y TẾ

1. Kiểm tra kỹ dụng cụ trước khi sử dụng có bị hư hỏng hay lỗi sản phẩm.
2. Lắp pin 2AA vào tay cầm
3. Lắp từng dụng cụ khám từng bộ phận thích hợp vào tay cầm, xoay ấn đến khi nghe tiếng “click” tức là dụng cụ khám đã khớp với tay cầm, xoay điều chỉnh mức độ sáng tối của đèn phù hợp
4. Phải sử dụng đúng tính năng của từng loại dụng cụ, đúng cho từng mục đích sử dụng.
5. Người sử dụng dụng cụ phải là người có kiến thức y khoa và được đào tạo về cách sử dụng dụng cụ
6. Có thể hấp tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút, nên tháo rời đèn trước khi tiệt trùng
7. Không được tiệt trùng nhanh và tiệt trùng trong không khí nóng hoặc dùng sóng siêu âm tiệt trùng
8. Đảm bảo dụng cụ phải khô ráo hoàn toàn trước khi bảo quản
9. Bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo

