

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên sản phẩm: XỊT XOANG

Chủng loại/mã sản phẩm: TANDI

1. THÀNH PHẦN

Chiết xuất Tân Di Hoa (5g), Chiết xuất Thương Nhĩ Tử (5g), Chiết xuất Ngũ sắc (5g), Bromelain (0.5g), Dung dịch bạc Nano 500ppm (0.1g), Benzalkonium chloride, Nước vừa đủ.

2. CÔNG DỤNG

Giúp làm sạch, hỗ trợ phòng ngừa và làm giảm các triệu chứng: nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cầm lọ xịt theo phương thẳng đứng, ấn vào 2 bên cánh của đầu xịt 2 - 3 lần trong không khí để phá màng bảo vệ bên trong của đầu xịt. Sau đó xịt vào mỗi bên mũi 1 - 2 cái. Ngày xịt 3 - 4 lần.

4. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

5. CHÚ Ý

Đề xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

6. BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 độ C, tránh ánh sáng.

7. HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Đức