

# Hướng dẫn sử dụng

## Gọng mũi đôi Cannula dùng cho máy trợ thở CPAP

1. Chọn cỡ gọng theo sơ đồ bên dưới cho phù hợp với bệnh nhân

CỖ	KÝ HIỆU	CÂN NẶNG BỆNH NHÂN
0	•	< 1500 grams
1	••	1500 - 2500 grams
2	•••	> 2500 grams

2. Mở túi hút chân không và lấy gọng mũi ra.
3. Nối gọng mũi với nguồn cấp khí. Nếu cần có thể tháo bỏ bộ nối ống khí.
4. Dùng băng dính an toàn cho da bé để cố định gọng mũi.
5. TRONG TRƯỜNG HỢP MỘT BỆNH NHÂN PHẢI THỞ MÁY LÂU DÀI, cứ 30 ngày phải thay gọng mũi một lần hoặc thay gọng mũi mỗi khi chuyển viện. Khi sử dụng nguồn khí ẩm và ấm, cũng phải thay gọng mũi sau 14 ngày sử dụng hoặc khi chuyển viện.
6. Sản phẩm sử dụng theo chỉ định của bác sỹ.

**Chú ý:** Mỗi gọng mũi chỉ được dùng một lần và không sử dụng cho nhiều bệnh nhân một lúc.