

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LẮC MÁU

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp đặt

- Máy nên đặt ở vị trí bằng phẳng, thông thoáng, sạch và thuận tiện cho thao tác lấy máu.
- Nơi đặt máy phải có đủ ánh sáng (tối thiểu 30Lux)

2. Chạy thử:

- Thử hoạt động cơ: Cắm điện vào ổ 220V – 50Hz cho máy hoạt động không tải. Bật công tắc (1) về vị trí (b) cho đĩa lắc hoạt động. nếu thấy máy lắc đều, nhịp nhàng và không có dấu hiệu tự dừng, kêu, rung, giật cục là được.
- Thử phần điện: Bật tiếp công tắc (1) về (c) và công tắc (4) về On sau đó nâng nhẹ thanh tỳ cho đến khi tiếng còi kêu và đèn nháy, đồng thời chốt kẹp ống dẫn máu hoạt động tốt là được.
- Như vậy là máy hoạt động bình thường. Hãy tắt máy để chuẩn bị cho quá trình vận hành.

3. Vận hành:

a/ Chuẩn bị:

- Chuẩn bị sẵn túi đựng máu theo qui định của bệnh viện
- Nâng thanh tỳ (9) đặt túi đựng máu vào đĩa lắc ở vị trí dưới chốt (10)
- Đặt lại thanh tỳ về vị trí ban đầu sao cho phễu (11) che kín tế bào quang điện.
- Chính vị trí chốt (10) sao cho phù hợp với dung tích của từng loại túi máu sử dụng.
- Luồn ống dẫn máu qua chốt kẹp (13)

b/ Thực hiện quá trình lắc máu:

- Cắm điện vào máy, bật công tắc (1) về vị trí giữa (b) cho đĩa lắc hoạt động đồng thời lúc này máu bắt đầu được lấy vào túi theo ống dẫn.
- Theo dõi lượng máu tăng dần trong túi tới khi lượng máu chiếm khoảng 2/3 dung tích túi thì bật công tắc (1) từ (b) lên (c) và công tắc (4) ở vị trí ON để mạch báo hiệu hoạt động ở trạng thái chờ.
- Lượng máu trong túi tăng dần cho tới khi đủ mức đặt trước thì bộ phận báo hiệu báo tín hiệu còi và đèn nháy. Đồng thời lúc này chốt (13) được Role kéo kẹp chặt ống dẫn máu.

Quá trình lấy máu tạm ngừng.

c/ Kết thúc:

- Đưa công tắc (1) về vị trí (a) để cắt điện cho mô-tơ và mạch báo hiệu.
- Nâng thanh tỳ lấy túi máu ra khỏi đĩa lắc.
- Đem túi máu đến nơi bảo quản theo qui định

Quá trình lắc máu tiếp theo được lặp lại như trên.

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Chuẩn Viettromed

Địa chỉ: Số 38 Ngõ 180, Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 364350584 Website: www.viettromed.com.vn