

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẶT NẠ / LƯỚI NHỰA CỐ ĐỊNH

THÔNG TIN CHUNG

Mặt nạ / Lưới nhựa cố định Klarity là thiết bị y tế được sử dụng để đảm bảo định vị chính xác và cố định cho bệnh nhân đang điều trị xạ trị.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mặt nạ/ Lưới nhựa cố định Klarity được chế tạo đặc biệt để nâng cao khả năng đúc khuôn nhằm đảm bảo độ co rút tối thiểu, mang lại sự thoải mái tối ưu cho bệnh nhân. Chúng có thể tạo khuôn ôm sát với cơ thể bệnh nhân.

BẢO QUẢN

Mặt nạ nhựa nhiệt dẻo Klarity phải được bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ ở nhiệt độ từ 50-95 ° F (10 - 35 ° C).

Mặt nạ được sử dụng một lần, vứt bỏ sau khi sử dụng. Mặt nạ được vứt bỏ theo chất thải cơ sở thông thường.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Làm nóng lò đối lưu hoặc lò cách thủy ở nhiệt độ 73°C
2. Lắp tấm đế vào bàn điều trị. Xác định vị trí mặt nạ đảm bảo căn chỉnh hiệu quả khi tạo khuôn
3. Cho bệnh nhân nằm lên tấm đế.
4. Lấy mặt nạ ra khỏi túi nhựa, đặt mặt nạ lên giá trong lò. Làm nóng mặt nạ bằng cách đặt mặt nạ vào lò. Mặt nạ sẽ trở nên trong suốt khi sẵn sàng cho việc đúc khuôn. Thời gian làm nóng từ 3 – 10 phút (tùy thuộc vào kiểu lò, thời gian tối đa không quá 30 phút). Hoặc đặt mặt nạ vào chậu nước, làm nóng mặt nạ từ 1 – 2 phút (không quá 5 phút).
5. Hơi căng mặt nạ trước khi đắp lên bệnh nhân.
6. Đặt mặt nạ lên trên vị trí cần điều trị, kéo nhẹ nhàng và đều đặt cho chất nhựa nhiệt dẻo xuống ở các cạnh, đưa các mặt bên vào các khe nhận.
7. Khóa các biên dạng bên vào đúng vị trí bằng các thanh chỉ mục hoặc các nêm.
8. Dùng ngón tay nhẹ nhàng và nhanh chóng nặn nhựa nhiệt dẻo theo đường nét của bệnh nhân.
9. Để mặt nạ trên người bệnh nhân cho đến khi nó nguội hẳn và nằm nghỉ ít nhất 10 phút. Chất nhựa nhiệt dẻo sẽ co lại một chút trong quá trình làm nguội.
10. Trước khi tháo mặt nạ phải đảm bảo mặt nạ đã nguội hoàn toàn. Việc tháo mặt nạ quá sớm có thể gây co rút quá mức sẽ gây khó chịu cho bệnh nhân.
11. Tháo mặt nạ ra khỏi tấm đế bằng cách tháo các thanh chỉ mục hoặc nêm và tháo mặt nạ ra khỏi bệnh nhân.

