



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG 1 LẦN

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Hưng

176, tổ 9 Thạch Bàn, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

ĐT: 024.35765922

Tên sản phẩm: *Dây hút nhót, Dây oxy, Mask xông khí dung.*

Chú ý:

- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
- Sản phẩm đã được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ, nên chỉ dùng sản phẩm khi còn nguyên bao bì
- Sản phẩm được sử dụng bởi những người có chuyên môn hoặc được bác sỹ chỉ định, hướng dẫn sử dụng

1. Dây hút nhót: Dùng hút mũi, đờm dãi, dịch...

Cách sử dụng:

1 đầu nối với thiết bị hút (máy hút dịch...), 1 đầu đưa vào mũi, họng bệnh nhân để hút.

2. Dây oxy: 2 nhánh các cỡ XL, L, M, S, XS

Dây mềm, một đầu gắn phễu, một đầu gắn có 2 nhánh, dùng cho bệnh nhân cần thở oxy.

Cách sử dụng: *1 đầu nối với nguồn cấp oxy trên máy tạo hoặc bình oxy, đầu 2 lỗ thông đưa lên mũi cho bệnh nhân thở.*

3. Mask xông mũi họng

- Mask xông mũi họng các cỡ XL, L, M, S, với dây dài, cốc đựng thuốc, mặt nạ mềm mại không gây khó chịu cho bệnh nhân.

Cách sử dụng:

- *Nối cốc đựng thuốc với máy xông khí dung.*
- *Nối mặt nạ hoặc ống thở miệng vào cốc đựng thuốc. Đặt mặt nạ lên mặt và chỉnh dây cột cho vừa khít hoặc đưa ống thở lên miệng*