



KT: D155 x R35 x C77mm  
i400, cán mờ



KT: 95x200mm



# Organic100<sup>®</sup>

KHĂN HẠ SỐT  
Hạ Nhiệt, Giảm Sốt

- Khăn được tẩm ảm bởi thành phần Gel hạ sốt Frescolat<sup>®</sup> Plus có tác dụng hạ sốt, giảm nhiệt hiệu quả.
- Dùng an toàn cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, cho con bú.
- Cam kết khăn ALEX<sup>®</sup> không dệt nhập khẩu, chất liệu dày dặn gấp đôi các sản phẩm khác trên thị trường. Có khả năng thấm hút dịch và giữ ảm tốt, tạo cảm giác mềm mại, không tạo sợi khi sử dụng.

**Sản phẩm được khử trùng bằng tia Gamma.  
Khăn giữ ảm đến 8H**

**GÓI x 01 khăn**

Chuyên gia tư vấn:  
**0948486006**



**Thương hiệu đã đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Nghiêm cấm vi phạm dưới mọi hình thức.**

#### **Đối tượng sử dụng:**

Dùng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn trong các trường hợp:

- Sốt do các nguyên nhân: nhiễm khuẩn, nhiễm virus, sốt mọc răng, sau tiêm chủng hoặc các nguyên nhân khác.
- Nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn bình thường do môi trường hoặc các yếu tố khác.
- Trẻ khó chịu, quấy khóc do thời tiết nắng nóng, trẻ bị ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, hăm tã, viêm da, côn trùng đốt.
- Trẻ cần làm sạch da trước khi sử dụng các loại kem bôi ngoài da.

#### **Cách dùng:**

Xem trong hướng dẫn sử dụng.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:** Khăn lau có thể được sử dụng nhiều lần đến khi hết ảm khi nhiệt độ môi trường thấp làm khăn quá lạnh, có thể ngâm cả túi khăn vào nước nóng 2-3 phút trước khi sử dụng. Không sử dụng khăn quá nóng hoặc quá lạnh. Không bỏ khăn đã sử dụng vào bồn cầu.

**BẢO QUẢN:** Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp với túi nguyên vẹn. Trong trường hợp đã mở túi nhưng chưa sử dụng hết, bảo quản khăn trong ngăn mát tủ lạnh.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



Chủ sở hữu sản phẩm, chủ sở hữu số lưu hành và phân phối sản phẩm:

**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC**

Địa chỉ: Số 24, phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0948486006 - Hotline: 02439942345

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN GRANDSTAR QUỐC TẾ**

Địa chỉ: BT1.1, khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.