

Số: 08092017

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2017

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH**

Địa chỉ: Số 892, Đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện: Bà Đỗ Lệ Thủy Chung Điện thoại: 098 4585 454

Mã số thuế: 0105720284

Điện thoại: 02462767858

**BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO**

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại Mã sản phẩm	Hướng dẫn sử dụng	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu
1	Kim phẫu thuật	KPT02	Bác sĩ hoặc y tá sử dụng khâu trực tiếp, di chuyển mũi kim qua mô da. Mũi cắt được dùng để khâu xuyên qua các tổ chức chắc như da. Mũi thon nhọn được dùng ở những tổ chức mềm, dễ bị rách như ở cơ, ruột. Còn mũi tù được dùng để khâu các tổ chức dễ vỡ nát.	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc
2	Bơm cho ăn	BA01	Lắp bơm cho ăn vào ống thông, đo một lượng thức ăn vừa đủ vào bơm cho ăn. Điều chỉnh tốc độ bằng cách điều chỉnh pit tông	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc
3	Dây truyền dịch không kim	DTDNN01	- Cắm kim của bộ dây vào các nút chai và đổi không khí trong bộ dây. -Đặt tấm nylon và gói nhỏ dưới vùng truyền. Sau đó chọn vùng tiêm, buộc dây cao su cách vị trí tiêm khoảng 3cm. Tiến hành sát khuẩn vùng tiêm	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super	Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union