

			<p>theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài, nên sát khuẩn nhiều lần nếu vùng tiêm quá bẩn.</p> <p>Điều dưỡng chọn size kim phù hợp lắp vào đầu nối của dây truyền sau đó dùng tay thuận cầm kim đưa vào tĩnh mạch (vùng vừa sát khuẩn) khi thấy có máu chảy ra nơi đầu ống tiêm thực hiện dùng tay kia tháo dây cao su ở trên tay, mở khóa cho dịch chảy vào tĩnh mạch.</p> <p>Lựa chọn nút chảy vừa phải để dịch chảy an toàn vào cơ thể, không quá nhanh hoặc quá chậm.</p> <p>Dùng miếng gạc mỏng đặt dưới đốc kim và dán băng dính lại ở đốc kim để cố định kim trên vị trí truyền của bệnh nhân.</p> <p>Rút tấm nylon, gói kê tay, dây cao su kê ở dưới tay hoặc chân bệnh nhân và đặt nẹp buộc cố định lại</p> <p>Lúc này, nên điều chỉnh tốc độ chảy của dịch truyền theo quy định</p>	Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc	Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc
4	Túi đựng nước tiểu người lớn	UB01	<p>Cột vào chân, khóa ngố thoát của túi cột. Khi không sử dụng tháo rời túi dùng qua đêm và vệ sinh sạch sẽ.</p>	<p>Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc</p>	<p>Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc</p>
5	Túi đựng nước tiểu trẻ em	UB02	<p>Cột vào chân, khóa ngố thoát của túi cột. Khi không sử dụng tháo rời túi dùng qua đêm và vệ sinh sạch sẽ.</p>	<p>Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc</p>	<p>Yangzhou Super Union Medical Material Co., Ltd/ Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd, Trung Quốc</p>