

**FILTERS OF PORTEX
LỌC HÚT DỊCH, NHỚT CÁC LOẠI**

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Tất cả các loại lọc dùng cho lọc khuẩn, hút dịch, nhớt giúp thở của Portex đều đạt tiêu chuẩn ISO và CE.
- Lọc của Portex: đa dạng chủng loại, nguyên liệu cao cấp.
- Màng lọc được thiết kế đặc biệt: độ lọc vi khuẩn, hút dịch cao, trao đổi độ ẩm- nhiệt tốt.
- Các co nối có độ chính xác cao, chặt.
- Hướng dẫn sử dụng:
 - + Mở trong điều kiện vô trùng.
 - + Ráp hai đầu của lọc theo đúng kích cỡ, đúng đầu.
 - + Lọc có port sẽ được dùng để đo CO2 khi cần thiết.
 - + Chú ý sử dụng đúng tính năng của từng mã hàng, cụ thể là:
 - Lọc 002531 : lọc hút dịch, nhớt
 - Lọc (Thoverment): Lọc cai máy thở dùng cho Bệnh nhân sau một thời gian thở qua Mở khí quản.
 - Lọc (Bact HME Port): lọc thở, lọc vi khuẩn dùng cho các trường hợp bệnh nhân là người lớn, cần hỗ trợ về trao đổi độ ẩm, cần thêm lỗ đo nồng độ khí CO2 khi cần thiết.
 - Lọc (HME 12 basic): lọc thở + trao đổi độ ẩm, dùng cho bệnh nhân là người lớn.
 - Lọc (Pharma mini port): lọc vi khuẩn + trao đổi độ ẩm, dùng cho bệnh nhân là trẻ em, có thêm chức năng trao đổi độ ẩm và có lỗ đo nồng độ CO2 khi cần thiết.
 - Lọc (HME 10 port): lọc thở+trao đổi độ ẩm, dùng cho bệnh nhân là trẻ em.
 - Lọc (Pharma Neo port): là loại lọc máy thở dùng để lọc vi khuẩn, trao đổi độ ẩm, dùng cho trẻ sơ sinh.
 - Lọc (Bact trap Mini port): là loại lọc máy thở dùng để lọc vi khuẩn, có thêm lỗ để đo nồng độ khí CO2 khi cần thiết, dùng cho bệnh nhân là trẻ em.
 - Lọc (Bact trap Hepa Port): là loại lọc dành riêng cho Máy giúp thở, lọc vi khuẩn và có lỗ đo nồng độ khí CO2 khi cần thiết.
 - Lọc (Bact trap basic): là loại lọc vi khuẩn dùng cho Bệnh nhân là người lớn.
 - Lọc (Bact trap port): là loại lọc vi khuẩn có thêm lỗ đo khí CO2 khi cần thiết và dùng cho Bệnh nhân là người lớn.
 - Lọc (Bact HME Midi Port): lọc thở, lọc vi khuẩn dùng cho các trường hợp bệnh nhân là trẻ lớn, cần hỗ trợ về trao đổi độ ẩm, cần thêm lỗ đo nồng độ khí CO2 khi cần thiết.
 - Lọc (Bact Trap Midi Port) : là loại lọc vi khuẩn có thêm lỗ đo khí CO2 khi cần thiết và dùng cho bệnh nhân là trẻ lớn



GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Quân