

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Dược Phẩm B.H.C
Địa chỉ: 145 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày .05 tháng .10 năm 2017.

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Túi chứa phân (túi hậu môn nhân tạo) một mảnh loại film trong, có lớp lót thoáng mồ hôi. Đế dán bao gồm một vòng đĩa bám dính và viền vải không dệt với vòng cắt, dính liền với túi. Một nắp đậy bằng nhựa bảo vệ đế dán che phủ bên ngoài đế.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Kẹp nhựa.
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng chứa phân thoát ra từ lỗ mở ra da (hậu môn nhân tạo)
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Cắt lỗ mở trên đế dán đến kích cỡ phù hợp. Tháo lớp giấy bảo vệ và dán đế lên bụng. Kẹp miệng túi. Xả túi khi đầy. Thay túi khi có dấu hiệu bung đế dán.
1.5	Chống chỉ định	Không có.
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm dán quanh hậu môn nhân tạo bị sa, đặc biệt là khi liên quan đến chứng phình niệu quản. Hiếm khi có báo cáo về sự xuất hiện của các sản phẩm dính trong nước tiểu thu được của những bệnh nhân này. Nếu phát hiện có sản phẩm dính trong nước tiểu, cần đánh giá khả năng tiếp tục sử dụng sản phẩm hay không, và có kế hoạch điều trị phù hợp.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có.
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	



#1	22771	ActiveLife One-Piece Drainable Pouch	1
----	-------	--------------------------------------	---

	- Malaysia
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Dùng chứa phân thoát ra từ lỗ mở ra da (hậu môn nhân tạo) (Malaysia)
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: Không có.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Nguyễn Nicholas Văn Nguyễn

