



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên cơ sở đăng ký lưu hành: Công ty TNHH Đạt Phú Lợi
Địa chỉ: 34 đường số 4, khu Bình Đăng, Phường 6, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ngày 15 tháng 09 năm 2017

Sản phẩm trang thiết bị y tế: Vớ Áp Lực Y Khoa VENOSAN (Chủng loại/mã sản phẩm: VENOSAN 4001 AD, ADH, AG, AGH, AGG, AT, ATU Materna, CG; VENOSAN 4002 AD, ADH, AG, AGH, AGG, AT, ATU Materna, CG; VENOSAN 7001 AD; VENOSAN 7002 AD, ADH, AG, AGH, AGG, AGT, AT, ATH, CG, CH-H, CH, ZG, ZG-H, ZH; VENOSAN 7003 AD, ADH, AG, AGH, AGG, AGT, AT, ATH, CG, CH-H, CH, ZG, ZG-H, ZH; VENOSAN 8002 ULCERFIT AD; VENOSAN 8003 ULCERFIT AD; VENOSAN JET LEGS AD; VENOSAN LEGLINE 20 AD, AGH, AT, ATU Materna; VENOSAN LEGLINE 30 AD, AGH, AT; VENOSAN MODELLA AD, AGH, AT; VENOSAN SUPPORT SOCKS COTTON AD; VENOSAN DIABETIC SOCKS AD; VENOSAN AES (Anti-embolism stockings) AD, AGH, AGG; VENOSAN 6001 AD, AGH, AT; VENOSAN 6002 AD, AGH, AT; VENOSAN FASHION Ccl. I AD, AGH, AT; VENOSAN FASHION Ccl. II AD, AGH, AT.)

Vớ áp lực y khoa Venosan được sản xuất tuân theo kỹ thuật y khoa mới nhất kết hợp với kỹ thuật dệt tiên tiến. Vớ được dệt từ các sợi vớ phù hợp với hệ sinh thái (được kiểm nghiệm tuân theo tiêu chuẩn Oeko – Tex 100), điều này làm cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc. Vớ VENOSAN phù hợp với các qui định trong nước cũng như Quốc tế. Vớ có đầy đủ ký hiệu kiểm nghiệm cho vớ áp lực y khoa, và được kiểm tra định kỳ bởi các tổ chức Quốc tế chính thức. Vớ Venosan là dụng cụ y khoa, vì vậy hoàn toàn cần thiết cho bạn đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng.

I. NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Cần thiết tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng vớ lần đầu tiên.
- Phải chọn đúng kích cỡ vớ với đôi chân của bạn.
- Không được gập vớ ở phần trên cùng vì có thể làm tăng áp lực lên gập đôi dẫn đến chèn ép.
- Nếu đang mang vớ mà bị đau, bạn cần hỏi ý kiến nhân viên y tế ngay.
- Nên chọn giày dép phù hợp khi mang vớ để tránh làm hư sợi vớ y khoa.
- Kem, thuốc mỡ hay dầu có thể làm hư hay làm ó vớ.
- Nếu sử dụng và chăm sóc vớ đúng theo hướng dẫn, vớ sẽ được sử dụng ổn định trong 6 tháng. Sau giai đoạn này, hiệu quả y khoa của vớ sẽ không được đảm bảo, và bạn nên mua vớ mới.
- Bạn nên tham khảo trang web www.venosan.

II. CÁCH MANG VỚ

Móng tay sắc bén hay bị gãy, da thô ráp, nhẵn đeo, vòng tay có thể làm hư sợi vớ mịn màng của vớ y khoa VENOSAN khi mang và cởi vớ ra. Vì vậy bạn nên sử dụng găng tay làm bếp để mang và cởi vớ. Các bước mang vớ như sau:

1. Bảo đảm rằng bàn chân và đôi chân của bạn không bị ẩm ướt. Bạn có thể sử dụng bột tan khi cần thiết.
 2. Lộn ngược bề trong của vớ ra ngoài cho đến tận gót vớ.
 3. Dùng hai ngón tay cái để mở rộng vớ và mang vớ qua khỏi bàn chân.
 4. Nắm chắc phần trên của vớ và kéo qua khỏi gót chân.
 5. Kéo vớ lên trên đùi và mát xa vớ theo hình zíc zắc.
- Bởi vì vớ VENOSAN được làm từ sợi đàn hồi cao, nên bạn không nên kéo vớ thẳng vớ lên trên. Bạn nên vừa kéo vừa lắc theo hình zíc zắc lên trên.



III. CỜI VỚ RA.

1. Kéo phần trên của vớ về hướng phía dưới mắt cá chân.
2. Đưa hai ngón cái vào giữa vớ và gót chân và đẩy vớ ra khỏi gót chân.
3. Kéo từ từ vớ ra khỏi bàn chân.

IV. GIẶT VỚ VÀ GIỮ GÌN.

Bạn có thể giặt vớ bằng máy giặt với nhiệt độ nước thông thường dưới 40°C giống như các loại áo quần lót. Việc giặt vớ thường xuyên không làm hư vớ. Không dùng chất làm mềm vải, chất tẩy hay chất làm sáng (như nhựa thông, hay chất tẩy bằng dầu...). Làm sạch miếng đệm silicone bằng cồn thường xuyên để làm tăng độ bám dính.

V. CHỈ ĐỊNH.

Sử dụng cho các trường hợp bị giãn tĩnh mạch nguyên phát hoặc thứ phát, giãn tĩnh mạch trong suốt thời gian thai kỳ, hỗ trợ sau phẫu thuật tĩnh mạch bằng liệu pháp gây xơ, sau phẫu thuật điều trị viêm tĩnh mạch huyết khối cũng như sau điều trị viêm sưng tĩnh mạch. Sử dụng trong thuyên tắc tĩnh mạch sâu, sau huyết khối, hay phòng ngừa huyết khối cho bệnh nhân không đi lại được. Sử dụng ở giai đoạn từ I – III theo tiêu chuẩn Widmer, hay từ C1S – C6 theo CEAP. Ngăn ngừa sự loét tĩnh mạch, sự khiếm khuyết của viêm mạch máu, sự loạn phát triển mạch máu, phù bạch huyết, phù trong thai kỳ, phù sau chấn thương, phù sau phẫu thuật, phù tuần hoàn tự phát, giai đoạn II phù mỡ hay trên, xung huyết sau bất động kéo dài (hội chứng ú trệ tuần hoàn viêm khớp, bại liệt hay bại liệt chi từng phần). Chỉ định thêm trong trường hợp sau bỏng, sẹo lồi tăng sinh.

VI. CHỐNG CHỈ ĐỊNH.

Vớ áp lực y khoa VENOSAN không được dùng cho các trường hợp sau:

Chống chỉ định tuyệt đối:

- Rối loạn tuần hoàn động mạch trầm trọng.
- Rối loạn bệnh thần kinh chi dưới trầm trọng.
- Rối loạn vi mạch máu trầm trọng.
- Bệnh nhân liệt giường.

Chống chỉ định tương đối:

- Phù chân voi
- Viêm da chảy nước.
- Suy tim mất bù.
- Đang bị thuyên tắc tĩnh mạch sâu.

VII. NGUY CƠ VÀ TÁC DỤNG PHỤ

Vớ có lớp silicone tại miếng đệm trên ở vớ đùi có thể dẫn đến kích ứng da đối với làn da nhạy cảm.

VIII. LƯU TRỮ.

Có thể được lưu trữ đến 36 tháng (nhìn nhãn hiệu). Lưu trữ vớ ở nhiệt độ phòng, tránh hơi ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp.

