



CÔNG TY TNHH TM TBYT HOÀNG THỊNH PHÁT

11 Phạm Quý Thích – Phường Tân Quý- Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh

Tel: 08.35592683-35592684 Fax: 08.35591955

Email : htpmedical@hoangthinhphat.vn - htpmedical@gmail.com


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU

Túi được gắn bởi nhân viên y tế có chuyên môn:

1. Nhân viên y tế rửa tay cẩn thận trong 15 giây và đeo găng vào khi làm thủ thuật
2. Đảm bảo khu vực làm việc sạch sẽ và khô ráo
3. Đặt khăn phía dưới ống thông tiểu cần nối vào túi
4. Kẹp khóa ống thông tiểu để nước tiểu không chảy ra ngoài
5. Tháo ống ra khỏi túi chứa hiện tại (nếu thay túi mới), rồi gắn ống với túi mới

Tháo kẹp khóa ống, dán băng keo cố định ống và túi, bắt đầu quá trình dẫn lưu nước tiểu vào túi chứa mới

Giám Đốc

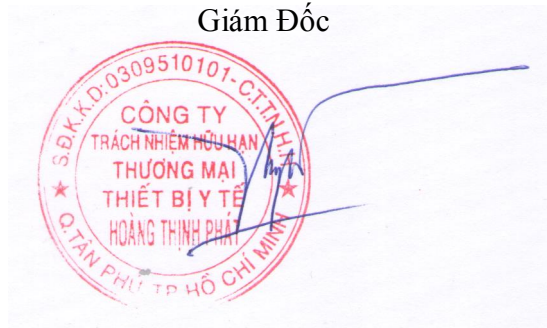

Phạm Thị Thùy Trang