



CT TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỖNH NGỌC

7A/70 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 6264.9088 - 6264.9096 - Fax: 6264.7616

Website: huynhngocmedical.com.vn

Ngày 06 tháng 10 năm 2017

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MÁY LI TÂM MODEL : UC-06R; UC06S; UC-012S



UC-06R



UC-06S



UC-012S

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt						
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế							
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Model	UC-06R	UC-06S	UC-012S			
		Tính năng	- Máy gọn, nhẹ, công suất lớn, độ ồn thấp, hiệu quả cao.	- Máy gọn, nhẹ, công suất lớn, độ ồn thấp, hiệu quả cao.	- Máy gọn, nhẹ, công suất lớn, độ ồn thấp, hiệu quả cao.			
		Thông số kỹ thuật	Tốc độ	4.000 vòng/phút	Tốc độ	4.000 vòng/phút	Tốc độ	4.000 vòng/phút
			Lực ly tâm	1790 * g	Lực ly tâm	1790 * g	Lực ly tâm	2325 * g
			Số ống	6* 20ml	Số ống	6* 20ml	Số ống	12* 20ml
			Nguồn điện	220V,50 Hz	Nguồn điện	220V,50 Hz	Nguồn điện	220V,50 Hz
			Công suất	25W	Công suất	25W	Công suất	40W
Kích thước	270(φ) x 230(h)m		Độ ồn	<65dB	Độ ồn	<65dB		

			m	Trọng lượng	5.5 kg	Trọng lượng	7.5 kg
		Trọng lượng	3.5 kg	Phạm vi cài đặt thời gian	0-30 phút	Phạm vi cài đặt thời gian	0-30 phút
		Độ ồn	<65dB				
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Liệt kê các linh kiện và phụ kiện của trang thiết bị y tế					
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Li tâm nước tiểu, huyết tương, huyết thanh và u-rê.					
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<p>Tóm tắt hướng dẫn về cách sử dụng của trang thiết bị theo như Tờ hướng dẫn sử dụng hoặc Tờ thông tin của trang thiết bị y tế</p> <p><u>UC-06S; UC-012S:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra: Đảm bảo nút điều khiển tốc độ trở tới vị trí "0". • Bật nguồn điện, sau đó xoay núm tốc độ đến tốc độ cần, máy bắt đầu chạy. • Bật hẹn giờ, chọn thời gian mà bạn muốn. • Khi thời gian được cài sẵn, máy sẽ ngừng chạy tự động. • Khi máy không hoạt động, hãy xoay núm tốc độ xuống vị trí "0". Tắt nguồn điện và lấy các ống nghiệm ra. <p><u>UC-06R:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kiểm tra: Đảm bảo nút điều khiển tốc độ trở tới vị trí "0". • Bật nguồn điện, sau đó xoay núm tốc độ đến tốc độ cần, máy bắt đầu chạy. • Để dừng máy, hãy xoay núm tốc độ xuống vị trí "0". Đợi máy dừng hẳn. Tắt nguồn điện và lấy các ống nghiệm ra. 					
1.5	Chống chỉ định	- Không có					
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng					
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có					
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)						
	- Trung Quốc.						
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)						
	- Không có.						
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế						

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



ĐÀO NGUYỄN TRÀ PHƯƠNG
GIÁM ĐỐC