




## LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK VI NA  
Địa chỉ: D8/53B Ấp 4 Nữ Dân Công, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tel:  
028-35033900. Email: vinaimexco@gmail.com

Ngày 25 tháng 05 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Găng tay kiểm tra	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Tính năng kỹ thuật và thông số: Có nhiều size XS, S, M, L, XL Chiều dài tối đa 230mm Rộng từ 70 đến 119mm Chiều dày từ 0.08 đến 0.10mm Có bột
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Dùng để mang vào tay khi khám bệnh bảo vệ tay tránh tiếp xúc với tác nhân gây bệnh như: vi khuẩn, vi rút, ký sinh cơ thể...
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Găng tay kiểm tra sử dụng 1 lần. - Trước khi sử dụng xác định rõ kích thước bàn tay người sử dụng để lựa chọn size găng tay chính xác tránh bị rách. - Lựa chọn 1 đôi (2 cái) găng tay bất kỳ, với tính năng sử dụng linh hoạt cho cả 2 tay, người dùng không phải mất thời gian cho việc lựa chọn. - Thực hiện phẩy nhẹ găng tay để giúp găng tay thẳng lại, không kết dính các ngón và lòng bàn tay. - Đeo bao tay vào các ngón tay trước, kéo dần vào lòng bàn tay. - Từ lòng bàn tay kéo toàn bộ găng tay ra sau cổ tay, đảm bảo cổ găng tay ra đến cổ tay. Không kéo trực tiếp cổ găng tay từ lòng bàn tay ra cổ tay vì rất dễ rách nếu kéo mạnh. - Tránh để móng tay, đeo các vật có móc nhọn hoặc kim loại nhám: nhẫn, vàng, lắc... - Bảo quản nơi khô thoáng tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Hộp găng tay đã mở sử dụng nên được cất kỹ tránh ánh sáng mặt trời và ánh điện. - Tránh sử dụng trực tiếp với hóa chất. Nếu da bị mẫn cảm,

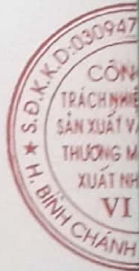

		ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): Không có	
	Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế Không có	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế - Không có	

