

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đầu nối male/male (male/male luerlock connector)

1. Tiệt trùng, cảnh báo:

Dụng cụ được tiệt trùng bằng ethylene oxide.

Không được tái sử dụng dụng cụ. Việc tái sử dụng có thể làm thay đổi chất lượng của dụng cụ hoặc gây nhiễm khuẩn chéo.

2. Mô tả:

Dụng cụ là 1 đầu nối hình trụ dài khoảng 2cm, gồm 2 đầu male.

Chỉ định:

Dùng để nối 2 đoạn dây lại với nhau.

3. Hướng dẫn sử dụng:

+ Mở bao bì. Trước khi mở bao bì, cần quan sát xem bao bì có bị rách hoặc hư hỏng không. Nếu có, dụng cụ không được tiếp tục sử dụng

+ Nối mỗi đầu với dây nối

+ Kiểm tra ren vặn xem có khớp với ren vặn của dây nối hay không.

4. Chú ý:

Không nên vặn quá chặt. Chỉ vặn đủ kín hệ thống. Vặn quá chặt có thể làm nứt đầu nối.

Đại diện hợp pháp của cơ sở
Giám đốc

Nguyễn Đình Trọng Thọ