

**TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế:

**Công Ty TNHH Chăm Sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam**

**Địa chỉ: 40/19 Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM**

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<b>Limisan</b> là một dụng cụ gỡ bỏ một số loại keo dính mà không đau. Limisan được thiết kế để làm cho dễ dàng, không đau, không gây chấn thương khi gỡ hầu hết các loại chất dính bao gồm băng thạch cao, dây băng, băng vải và miếng dán.  Chai xịt Limisan 50ml, chứa những thành phần sau: Silicons, Bisabolol, Spearmint, chiết xuất ARC, Butane, Propane;
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Mỗi hộp Limisan chứa chai xịt 50 ml
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giúp gỡ băng vết thương không đau</li> <li>• Giữ ẩm nhằm hỗ trợ làm lành vết thương</li> </ul>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Xịt Limisan vào rìa và trên đầu miếng băng dính cho tới khi thấy nó hơi ướt. Tránh xịt vào mắt và màng nhầy. Trực tiếp bóc miếng băng ra khỏi da. Xịt thêm Limisan để dễ dàng bóc gỡ nếu cần thiết. Gỡ băng ra một cách nhanh chóng để tránh cặn bã keo còn dính lại trên da.
1.5	Chống chỉ định	Chưa phát hiện
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chỉ sử dụng ngoài da</li> <li>• Để xa tầm tay và khu vực của trẻ nhỏ</li> </ul>
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa phát hiện
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
	Hà Lan, Canada, Đan Mạch	

3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Chưa có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở  
Giám Đốc**



**Nguyễn Tân Sang**