

LIMISAN Gỡ băng thạch cao không đau DÙNG ĐỂ GỖ BĂNG VẢI VÀ PHẦN BÃ KEO CÒN LẠI	LIMISAN SPORT Gỡ băng dán thể thao DÙNG ĐỂ GỖ THỂ THAO VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU	LIMISAN PRO Gỡ băng dính y tế DÙNG ĐỂ GỖ BĂNG DÍNH Y TẾ
---	--	--

ĐỌC KỸ TỜ HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LIMISAN. GIỮ LẠI TỜ HƯỚNG DẪN VÌ BẠN CÓ THỂ CẦN NÓ CHO LẦN SAU

Limisan là gì?

Limisan là một dụng cụ gỡ bỏ một số loại keo dính mà không đau. Limisan được thiết kế để làm cho dễ dàng, không đau, không gây chấn thương khi gỡ hầu hết các loại chất dính bao gồm băng thạch cao, dây băng, băng vải và miếng dán. Điều này thân thiện hơn với da và giúp thúc đẩy làm lành vết thương tốt hơn cũng như làm giảm tác hại cho da và vùng xung quanh vết thương do gỡ băng. Limisan là dạng chai xịt đậm bảo sử dụng để dàng và có tác dụng trong vài giây. Có thể xịt từ trên xuống và từ dưới lên. Limisan rất êm dịu và không cay! Limisan khô nhanh chóng và không ảnh hưởng đến lần dán sau. Mỗi sản phẩm Limisan bao gồm:

1. Chai xịt 50ml, chứa những thành phần sau: Silicons, Bisabolol, Spearmint, chiết xuất ARC, Butane, Propane;
2. Tờ hướng dẫn sử dụng thể hiện tất cả những thông tin mà bạn cần biết về Limisan và cách sử dụng Limisan. Giữ tờ hướng dẫn này để tham khảo.

Limisan làm việc như thế nào?

Limisan chứa một hỗn hợp các thành phần, nó nhanh chóng tạo thành một lớp nằm giữa các chất kết dính và da. Lớp này phá hủy trạng thái kết chặt của chất dính do làm mất hoàn toàn chất keo và cho phép miếng băng được tháo ra nhẹ nhàng. Tất cả thành phần của Limisan được bốc hơi nhanh chóng nhằm để dán miếng băng mới một cách dễ dàng.

Sử dụng Limisan trên băng thạch cao và các loại băng dính khác như thế nào?

BƯỚC 1: Ngay khi bạn muốn gỡ băng thạch cao và các loại băng khác ra khỏi da, bạn có thể xịt Limisan vào rìa và trên đầu miếng băng dính cho tới khi thấy nó hơi ướt. Tránh xịt vào mắt và màng nhầy.

BƯỚC 2: Trực tiếp bóc miếng băng ra khỏi da. Xịt thêm Limisan để dễ dàng bóc gỡ nếu cần thiết. Gỡ băng ra một cách nhanh chóng để tránh cặn bã keo còn dính lại trên da. Nếu vẫn còn cặn, bã dính lại? Bạn có thể dễ dàng bóc chúng ra bằng cách xịt Limisan lên một miếng vải và dùng miếng vải này để bóc bã keo đó.

BƯỚC 3: Limisan sẽ nhanh chóng khô và không cần lau khu vực này.

BƯỚC 1 (illustrative picture)	BƯỚC 2 (illustrative picture)	BƯỚC 3 (illustrative picture)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Làm sao dùng Limisan trên bã keo còn lại?

BƯỚC 1: Ngay khi bạn muốn gỡ bất kỳ bã keo nào còn dính lại trên da, bạn có thể xịt Limisan lên miếng vải.

BƯỚC 2: Cọ xát miếng vải lên bã keo và bã keo sẽ được bóc ra khỏi da.

Làm sao để dùng Limisan quanh vùng mắt?

BƯỚC 1: Ngay khi bạn muốn gỡ miếng băng dính quanh vùng mắt, xịt Limisan lên nắp chai.

BƯỚC 2: Nhấn miếng vải lên lên dung dịch trên nắp.

BƯỚC 3: Đặt miếng vải ướt này lên miếng băng dính cho tới khi thấy nó ẩm và bóc nhẹ nhàng miếng băng ra khỏi da. Dùng thêm dung dịch Limisan để dễ dàng gỡ băng nếu thấy cần thiết.

Lưu ý

- Không nên dùng Limisan nếu bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm
- Mặc dù Limisan được chứng minh “rất tốt” thông qua việc kiểm tra an toàn trên da, chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra Limisan trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng;
- Tránh để dung dịch bay vào mắt hoặc màng nhầy khác. Trong trường hợp bị tiếp xúc với mắt, rửa kỹ với nước. Không nuốt dung dịch. Nếu đã nuốt, không thúc dục cho nôn mửa và tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
- Không hít dung dịch, chỉ dùng ở vùng thông thoáng. Nếu đã hít, chuyển người này đến khu vực không khí trong lành và đặt ở vị trí thoải mái để hít thở.
- Không tiếp tục dùng sản phẩm nếu có những tác dụng không mong muốn và tư vấn của bác sĩ. Nếu cần khám bệnh, nên mang theo sản phẩm hoặc nhãn sản phẩm;
- Bảo quản sản phẩm trong phòng và không đặt vào nơi có nhiệt độ trên 50 độ C. Bảo quản nơi thông thoáng. Không đâm thủng hay đốt cháy sản phẩm ngay cả khi hết sử dụng.
- Để xa tầm tay trẻ em;
- Sản phẩm dễ cháy - để xa chỗ nóng/tia lửa/ngọn lửa cháy/bề mặt nóng và không hút thuốc trong khi sử dụng sản phẩm. Không xịt vào ngọn lửa cháy hay các dụng cụ mồi lửa khác;
- Chỉ dùng bên ngoài;
- Không dùng sản phẩm hết hạn sử dụng;
- Tránh bày ra môi trường bên ngoài.

Thông tin thêm về sản phẩm, vui lòng truy cập website: www.limisan.vn
Hoặc gọi cho Nhà Phân Phối của chúng tôi tại Việt Nam: 08-62962262

Nhà sản xuất Archy Medical B.V. Westhove 119 1187 DB Amstelveen, Hà Lan	(Logo HBC) Phân phối độc quyền tại Việt Nam Công Ty TNHH Chăm Sóc Khỏe và Đẹp Việt Nam 40/19 Bàu Cát 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: +848-62962262	CE www.limisan.vn
---	---	--