



CÔNG TY TNHH MI VI TI

763 QUỐC LỘ 22 - THỊ TRẤN CỬ CHI - TP.HCM

ĐT: (08)3 8920389 – 094 12 72 12; FAX: (08) 38924779

E-mail: noithatmimi@gmail.com . Website : www.noithat-mimi-furniture.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Giường y tế

1. Linh kiện sản phẩm

- Thân giường
- Chân giường
- Đầu đuôi giường
- Nệm giường
- Thanh chắn
- Cọc truyền dịch
- Móc treo nước tiểu

2. Lắp ráp sản phẩm:

- Lắp chân giường vào giường, siết chặt các đai ốc
- Cho giường đứng lên
- Gắn đầu và đuôi giường vào
- Gắn thanh chắn giường (nếu có)
- Gắn cọc truyền dịch (khi cần)
- Gắn móc treo nước tiểu vào.
- Đặt nệm giường lên trên mặt giường.
- Gắn bàn ăn lên khi cần (nếu có).

3. Sử dụng giường

- Dùng tay (hoặc bàn điều khiển điện) để quay phần lưng giường lên hoặc xuống (nếu giường có chức năng nâng lưng).
- Dùng tay quay (hoặc bàn điều khiển điện) để nâng hoặc dũi thẳng chân (nếu giường có chức năng này).
- Dùng tay quay (hoặc bàn điều khiển điện) để nâng chiều cao giường lên hoặc xuống (nếu giường có chức năng này).
- Dùng tay quay (hoặc bàn điều khiển điện) để nghiêng đầu hoặc đuôi giường (nếu giường có chức năng này).
- Dùng tay ấn mạnh nút nhựa trên đầu thanh chắn để kéo thanh chắn đứng lên hoặc thả nằm xuống rồi buông tay ra.
- Dùng chân ấn vào nút khóa/mở bánh xe của giường để cố định hoặc mở bánh xe.



Đại diện hợp pháp của cơ sở

Huỳnh Tân Lập