

Bộ dụng cụ lấy mẫu dùng 1 lần

Que mũi họng

Que ty hầu

Ống vận chuyển môi trường



- Que lấy mẫu sử dụng công nghệ tơ nylon cây bằng công nghệ tiên tiến. So với gạc sợi thông thường, mẫu dễ dàng được ngấm, pha loãng và bị giữ lại trong sợi. tấm bông nylon có khả năng thu thập và hòa tan mẫu vượt trội, và tỷ lệ hòa tan có thể đạt 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tấm bông thông thường.
- Các dung dịch của Hank màu đỏ nhạt có chứa chất kháng sinh có thể ức chế hiệu quả sự sinh sản của vi khuẩn và nấm.
- Các dung dịch bảo quản không màu và trong suốt có thể khử hoạt tính hiệu quả của vi rút và giảm sự phân giải acid nucleic của virus.

Hướng dẫn vận hành

Cat. No.	Ống bảo quản	Loại ống	Loại tăm bông lấy mẫu	Thể tích dung dịch
ST8001-1	Dung dịch không màu (vô hiệu hóa)	5ml	Que ty hầu Que mũi họng Que ty hầu	2ml/3ml
ST8001-2	Dung dịch không màu (vô hiệu hóa)	5ml	Que mũi họng	
ST9001-1	Dung dịch màu đỏ nhạt (môi trường nuôi cấy)	5ml	Que ty hầu Que mũi họng Que ty hầu	2ml/3ml
ST9001-2	Dung dịch màu đỏ nhạt (môi trường nuôi cấy)	5ml	Que mũi họng	
ST8001-1	Dung dịch không màu (vô hiệu hóa)	10ml	Que ty hầu Que mũi họng Que ty hầu	2ml/3ml
ST8001-2	Dung dịch không màu (vô hiệu hóa)	10ml	Que mũi họng	
ST9001-1	Dung dịch màu đỏ nhạt (môi trường nuôi cấy)	10ml	Que ty hầu Que mũi họng Que ty hầu	2ml/3ml
ST9001-2	Dung dịch màu đỏ nhạt (môi trường nuôi cấy)	10ml	Que mũi họng	



1. Mở gói, lấy ống đựng mẫu và tăm bông ty hầu ra. Đánh dấu thông tin trên nhãn hoặc mã vạch trước khi lấy mẫu.



2. Lấy mẫu ở mũi và hầu theo cách khác nhau



3. Sau khi lấy mẫu, đặt que vào ống bảo quản và bẻ thanh gạt tại điểm gãy




4. Đóng nắp ống, mẫu được vận chuyển đến phòng thí nghiệm trong 48h ở 2-8°C



Không độc hại

Được bọc riêng và vô trùng

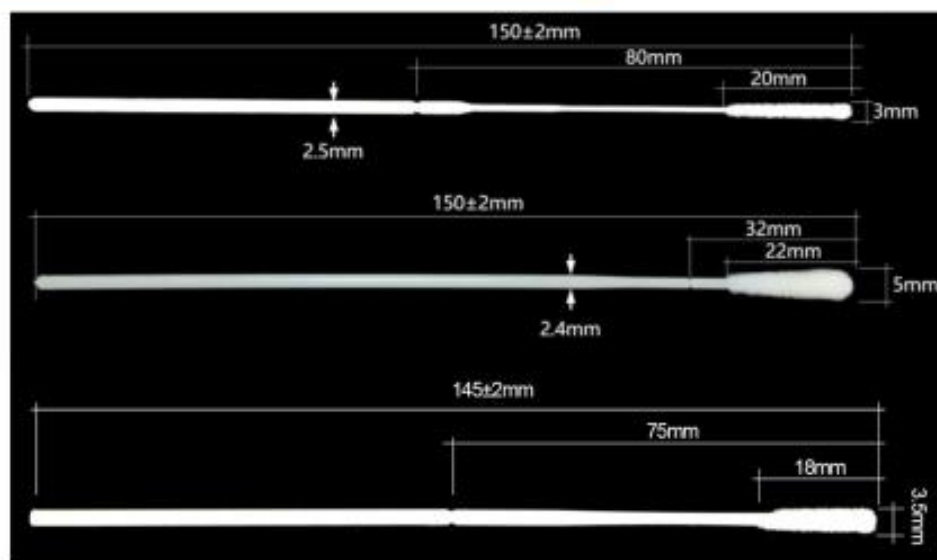

Que mũi họng


Que ty hầu

Tăm bông thông thường

Que mũi họng
Chiều dài tổng thể (150 ± 2mm)
Đường kính (3mm)
Điểm ngắt: 80mm
Vật liệu: ABS
Đầu que: Đường kính (3 mm); chiều dài (20mm)
Chất liệu: vải sợi

Que mũi họng
Kích thước Chiều dài tổng thể (150 ± 2mm)
Đường kính (3mm)
Điểm ngắt: 32mm
Vật liệu: ABS
Đầu que: Đường kính (5 mm); chiều dài (22mm)
Chất liệu: vải sợi

Que thông thường
Chiều dài tổng thể (145 ± 2mm)
Đường kính (3.5mm)
Điểm ngắt: 75mm
Vật liệu: ABS
Đầu que: Đường kính (3.5 mm); chiều dài (18mm)
Chất liệu: vải sợi

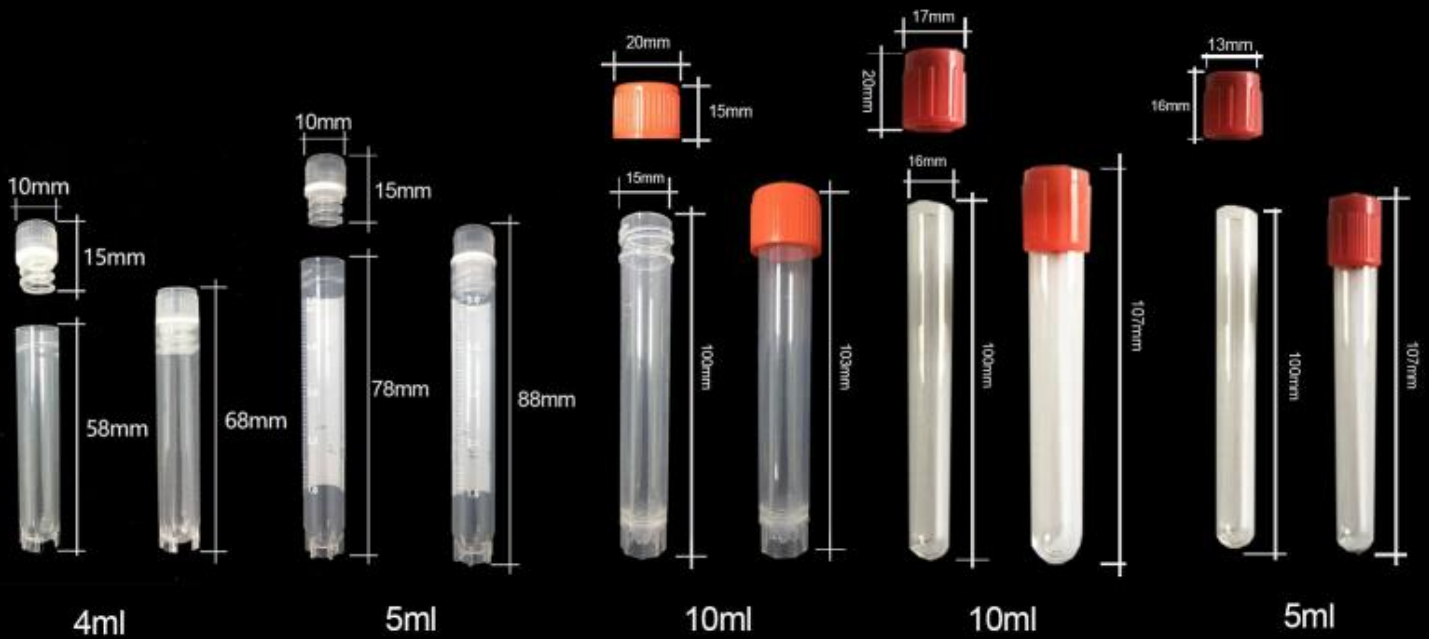

BioTeke

Công ty TNHH BioTeke Corporation (Vô Tích)

Địa chỉ: Tầng 4, D5, No.1719, Đại lộ Huishan, Vô Tích,

400-678-8982

www.bioteke.cn

