

Hướng dẫn lắp đặt

Giường bệnh nhân

(Model :TB-512BR Series)

1. Cấu tạo ngoài
2. Chi tiết sản phẩm
3. Lắp ráp
4. Lưu ý



Taedong Prime Co., Ltd..

543-20, An-dong, Gimhae city, Gyeong nam, South Korea

TEL : 82-55-326-3171 Fax : 82-55-326-3170

www.hospitalbed.co.kr www.patientbed.com

1. Cấu tạo ngoài















STT	Tên	SL	Kích thước	Đặc điểm
1	Thành đầu giường và thành cuối giường	2	Nhựa đúc thổi PP	Gắn 4 cọc màn
2	4 cọc màn	4	Ø 17mm * L130	Nhựa đúc phun ép
3	Bàn ăn nhanh	1	L845 * W340 * T15	Gỗ MDF
4	Mặt giường	1	Ø 6mm	Thép carbon
5	Thanh đỡ bàn ăn	2	Ø 25.4mm	Ống thép
6	Giảm chấn góc	4	Ø 27mm * Ø98mm * T30mm	Nhựa đúc phun ép PE
7	Giảm chấn thứ 2	4	Ø 27mm * Ø80mm * T120mm	Nhựa đúc phun ép PE
8	Thanh chắn hai bên	2	Có thể gấp lại, dạng ống, không gỉ	
9	Tay quay	1	30mm * 30mm * 150mm	Nhựa đúc phun ép
10	Bánh xe	4	Kích thước 5" có chức năng khóa	Chức năng khóa bánh
11	Chân giường	2	30mm* 50mm, 20mm*40mm	Ống vuông
12	Khung giường	1	2.00mm bằng thép	Carbon Steel Bending

2. Chi tiết sản phẩm





STT	Description	QPA	Dimension	Picture
1	Bu long chân Ốc chân, Vòng đệm đàn hồi chân	8cái 8cái 8cái	1/2" * 1. 1/2" 1/2" 1/2"	
2	Bu long bàn ăn nhanh Ốc bàn ăn nhanh	2cái 2cái	5/16" * 5.5/16" 5/16"	
3	Bu long và ốc để cố định bàn (Sử dụng trong trường hợp lắp đặt, không cần thiết)	4ea 4ea	M5 * 25 M5	
4	Bu long và ốc thành đầu và cuối giường	4 cái 4 cái	M8 *35mm M8.5 * 50mm	
5	Bu lông : Ống lót : Vòng đệm đàn hồi :	4 cái 4 cái 8 cái	5/8" * 70 5/8" 5/8"	
6	Đàn hồi góc	4 cái	Đường kính ngoài : 98mm Đường kính trong : 27mm Độ dày : 38mm	
7	Đàn hồi góc thứ hai (Phải 2 cái / Trái 2 cái)	4 cái	Đường kính ngoài : 80mm Đường kính trong : 27mm Chiều cao : 122mm	

*** Vui lòng kiểm tra số lượng phụ kiện lắp ráp trước khi cài đặt

3. Cài đặt

1 (Không cần thiết)	2 (Không cần thiết)	3 (Không cần thiết)
		
Chuẩn bị bàn và các phụ kiện cần thiết	Gắn bàn vào giá đỡ	Vặn chặt bu long và ốc bằng khoan và cờ lê
4	5	6
		
Bàn hoàn chỉnh	Di chuyển khung giường đến một nơi bằng phẳng	Đặt xuống nền phẳng
7	8	9
		
Đặt chân bàn vào với bàn sao cho khớp lỗ	Đặt bu long vào lỗ, chèn cao su đàn hồi và vặn ốc.	Vặn chặt ốc sử dụng cần siết hơi hoặc điện
10	11	12
		
Lật giường lại	Tháo 4 dây buộc ra	Nâng phần lưng sử dụng tay quay ở mức 30°

<p style="text-align: center;">13</p> 	<p style="text-align: center;">14</p> 	<p style="text-align: center;">15</p> 
<p>Đặt giảm chấn thứ hai vào mép giường (Right 2, Left 2)</p>	<p>Đặt tấm chắn bên lên giường sao cho các lỗ khớp nhau</p>	<p>Đặt vòng đệm vào bu long sau đó gắn bu long vào lỗ</p>
<p style="text-align: center;">16 (Foldable Side)</p> 	<p style="text-align: center;">17 (Foldeable Side)</p> 	<p style="text-align: center;">18 (Foldable Side)</p> 
<p>Lắp bulong</p>	<p>Vặn chặt bulong bằng cần siết điện</p>	<p>Đặt thành đầu giường và thành cuối giường vào mép giường</p>
<p style="text-align: center;">19</p>	<p style="text-align: center;">20</p>	<p style="text-align: center;">21</p>
		
<p>Chuẩn bị sẵn giảm chấn, bulong và ốc cho thành đầu và cuối giường.</p>	<p>Lắp các thiết bị như trong hình</p>	<p>Vặn chặt sử dụng cần siết điện</p>
<p style="text-align: center;">22</p>	<p style="text-align: center;">23</p>	<p style="text-align: center;">24</p>
		
<p>Chuẩn bị sẵn bộ bàn ăn nhanh</p>	<p>Lắp bulong vào lỗ</p>	<p>Lắp bulong vào ốc trên khung giường</p>

<p style="text-align: center;">25</p> 	<p style="text-align: center;">26</p> 	<p style="text-align: center;">27</p> 
<p>Vặn chặt ốc sử dụng càn siết điện</p>	<p>Set nuts into bolts</p>	<p>Kiểm tra hai tay quay</p>
<p style="text-align: center;">28</p>		
		
<p>Mở khóa bánh, đặt đệm lên và chuyển đến phòng bệnh</p>		

***** Thanh chắn hai bên không giống ở trên. Chi tiết xem tại catalogue sản phẩm.**

3. Lưu ý

- Sử dụng giường dưới sự theo dõi của bác sỹ và y tá.
- Không tự ý thay đổi bất kỳ chi tiết nào của sản phẩm
- Nếu giường có trục trặc kỹ thuật, ngừng sử dụng ngay lập tức.