

Số:CV/AK-SYT

Tp.HCM ngày 18 tháng 10 năm 2017

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TÚI CHO ĂN :

- Đóng kẹp điều khiển cho thức ăn, dưỡng chất theo công thức vào túi và đóng túi lại.
- Từ từ mở kẹp điều khiển và cho thức ăn xuống ống cho ăn
- Đóng kẹp kiểm soát chặt.
- Gắn adapter vào ống cho ăn. Từ từ mở kẹp để mở tốc độ nhỏ giọt mong muốn, bắt đầu cho ăn.

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Lê Quỳnh Nga