

# Hướng dẫn sử dụng đông máu

## Model: AUTO CLOT

### 1. BẬT CÔNG TÁC NGUỒN (ON) PHÍA SAU THIẾT BỊ

-Thiết bị sẽ tự động kiểm tra hệ thống, rửa kim hút và màn hình sẽ hiện thị ( CHECK ). Sau khi hoàn thành màn hình sẽ hiện thị ( CHECK END ). Máy in sẽ tự động in ra giấy in như sau:

AUTOCLOT	RAL, S.A.
DATE	

-Sau đó màn hình sẽ hiện thị tiếp:

PROBE READY TO BE CLEANED PRESS OK AFTER CLEANING... DETECTION: OK
--

-Màn hình sẽ hiện thị ( MAIN MENU )

1.METHODS 2.WORKLIST 3.PROFILES 4.UTILITIES
--

*( Lưu ý: Để máy ổn định nhiệt độ trước khi thực hiện xét nghiệm )*

-Chọn (1. METHODS) để thực hiện test, màn hình sẽ hiện thị như sau:

CODE: ( )
1. PT    2. PTT    3. FIB    4. T

-Chọn test bằng cách nhấn số theo thứ tự rồi nhấn OK  
Chọn test (PT) nhấn Ok, màn hình sẽ hiện thị như sau:

CALIBRATE (Y/N)
-----------------

Yêu cầu CALIBRATE TEST, chọn (YES) hoặc (NO), sau đó thiết bị yêu cầu chọn vị trí của mẫu và ID mẫu bệnh nhân, thiết bị sẽ hiện thị thông báo nhắc nhở thay thế cuvette:

PREMENBER TO REPLACE CUVETTE PRESS OK WHEN READY...
--

-Sau khi đặt mẫu bệnh và cuvette vào đúng vị trí yêu cầu. Nhấn (START) và đợi thiết bị thực hiện  
-Sau khi đo xong thiết bị sẽ tự động in kết quả bên ngoài và trở lại màn hình chính.  
-Để thực hiện test xét nghiệm khác thao tác tương tự như trên.

-Chọn ( 2. WORKLIST) để thực một lần cho nhiều xét nghiệm như: PT, PTT, FIB, T

ERASE WORKLIST (Y/N)?
-----------------------

-Nhấn (Y) và màn hình hiện thị như sau:

POS:1	ID:1		
1.PT	2.PTT	3.FIB	4.T
START	STOP	PRINT	

- Chọn test bằng cách nhấn [CODE: (1,2,3,4)]. Nhập ID cho mẫu bệnh và nhấn OK, để đo mẫu kế tiếp nhấn mũi tên hướng xuống ( ↓ ). Nhấn (START) để thực hiện đo mẫu.
- Sau khi đo xong thiết bị sẽ tự động in kết quả bên ngoài và trở lại màn hình chính.
- Để thực hiện test xét nghiệm khác thao tác tương tự như trên.

**LƯU Ý:**

- \* Các lọ thuốc thử bảo quản qua đêm trong tủ lạnh phải được lắc đều trước khi sử dụng
- \* Cuối ngày làm việc dọn sạch bộ máy, bật công tắc nguồn về vị trí OFF, rút phích cắm điện và phủ bao máy
- \* Mỗi tuần vệ sinh bộ máy và các khu vực ủ bằng bông thấm nước ấm. dùng javel 5% pha loãng 1/10 để tẩy các vết huyết tương và thuốc thử bán trên bộ máy hoặc ủ nhiệt, sau đó lau nước sạch và sấy khô
- \* Không mở nắp máy vì bất cứ lý do gì