


Công ty Cổ phần Thiết bị METECH

Tầng 1, Nhà A, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84 -4 3576 6396

Fax: +84 -4 3576 6382

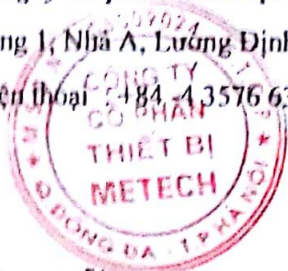

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KÌM GIỮ KẸP CLIP TITAN

1. Chọn cỡ kim giữ kẹp Clip phù hợp, tương ứng với cỡ Clip
2. Kiểm tra sự tương thích của tất cả các dụng cụ và phụ kiện trước khi sử dụng
3. Tháo nắp bảo vệ khỏi dụng cụ trước khi tiệt trùng
4. Sử dụng kỹ thuật vô trùng, lấy dụng cụ ra khỏi bao bì vô trùng. Để tránh làm hỏng hay bất cứ nguy cơ nào cho thiết bị, cẩn thận đặt dụng cụ vào vùng vô trùng.
5. Giữ kim kẹp bằng tay cầm và cò bắn. Đặt kim mang clip ở vị trí mà đảm bảo rằng mũi kim mang kẹp hoàn toàn mở và không bị đè nén. Khi đưa mũi kim vào khe của hộp đựng clip, cần đảm bảo nó được đưa vuông góc với bề mặt của hộp clip. Cần đặt hàm kéo của kim mang clip trên 1 khe của vỏ đựng clip
6. Nhấn kim mang clip xuống một cách dứt khoát cho tới khi nghe thấy tiếng "tách". Không sử dụng lực để đẩy kim. Kim nên được di chuyển ra vào khe của hộp clip một cách dễ dàng
7. Nhấc kim mang clip ra khỏi vỏ clip và kiểm tra chắc chắn rằng chân clip không bị lòi ra khỏi mũi của hàm kẹp clip. Clip nên được đặt ngay ngắn trong hàm kẹp clip
8. Tránh việc đóng hàm kim mang clip sớm vì điều đó sẽ gây ra việc clip bị đóng từng phần và bị trượt trở lại.
9. Khi cần thiết, mạch máu cần được buộc thắt trước khi ứng dụng kẹp clip vào mạch máu. Không sử dụng một chiếc kim đã mang clip để làm sạch mạch máu vì clip có thể bị rơi ra.
10. Người dùng cần thiết lập vị trí tổn thương không bị che khuất tầm nhìn và xác định vị trí để kẹp clip. Người dùng không nên dùng kim mang clip để lấy tầm nhìn trên mạch máu.
11. Ở vị trí phẫu thuật, bác sĩ nên bấm hàm kẹp clip một cách trơn tru, chắc chắn và nhịp nhàng, dùng lực vừa đủ cho tới khi clip hoàn toàn kẹp khít vào mạch máu, đảm bảo khóa đã được đóng lại và clip đã ở đúng vị trí.
12. Bỏ kim mang clip ra khỏi khu vực mổ.

Lưu ý:

- *Kim giữ kẹp clip là dụng cụ sử dụng nhiều lần và không được tiệt trùng. Cần làm sạch và tiệt trùng dụng cụ trước mỗi lần sử dụng.*
- *Chỉ sử dụng kim kẹp clip có kích cỡ tương ứng với cỡ clip sử dụng.*
- *Thiết bị phải được sử dụng bởi người có chuyên môn và được đào tạo.*