



# biores

diagnostics

## ALKALINE DETERGENT BẢO QUẢN Ở 10-35°C

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này được sử dụng để làm sạch đầu dò mẫu và phản ứng cuvette của máy phân tích Monarch.

NỘI DUNG BỘ SẢN PHẨM	MONDETOA	MONDET1L	MONDET5L
Alkaline Detergent composed of sodium hydroxide and surfactant	6 x 100 ml	1 x 1000 ml	1 x 5000 ml

### NGUYÊN TẮC KIỂM TRA

Chất hoạt động bề mặt và natri hydroxit có thể loại bỏ các chất hữu cơ như protein.

### LƯU TRỮ VÀ ỔN ĐỊNH

Chất tẩy rửa phải được bảo quản khô, đậy kín và tránh ánh nắng mặt trời ở nhiệt độ 10-35°C. Nếu các điều kiện bảo quản này được duy trì, chất tẩy rửa sẽ ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn.

### THỦ TỤC

Đổ lượng chứa trong chai 100ml vào túi đựng 10L rỗng (Thùng chứa chất tẩy rửa) được cung cấp và thêm 9,9 lít nước cất vào đây để pha loãng chất cô đặc. Điều này bây giờ đã sẵn sàng để sử dụng.


Tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy phân tích Monarch liên quan để biết chi tiết về cách sử dụng sản phẩm.


### CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA


1. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu chất tẩy tiếp xúc với da, hãy rửa bằng nước. Nếu chất tẩy rửa tiếp xúc với mắt, hãy rửa với nhiều nước và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Nếu vô tình nuốt phải chất tẩy rửa, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
2. Sử dụng găng tay bảo hộ khi xử lý sản phẩm vì có nguy cơ dẫn đến bỏng.
3. Không để bột giặt tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh nắng trực tiếp.
4. Chất tẩy rửa kiểm đặt ở vị trí W1 trên máy phân tích nên được thay thế hàng ngày.





5. Thuốc thử và mẫu xét nghiệm có khả năng lây nhiễm tiềm ẩn. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường, bao gồm (nhưng không giới hạn) các quy trình phòng thí nghiệm tốt, cần thiết để xử lý tất cả các thuốc thử trong phòng thí nghiệm.
6. Tất cả các thành phần phải được xử lý một cách an toàn và phù hợp với các yêu cầu pháp lý và quy định của địa phương.


 For In Vitro Diagnostics Use Only


 Lot Number


 Catalogue Number


 Storage Temperature

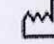
 Expiry Date (Year / Month)

 Warning, Read Enclosed Documents

 Consult instructions for use

 Manufacturer

 CE Marking Conformité

 Date of Manufacture

