



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ

Số 116, ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, tp Hà Nội

Tel: 0243.5626781 Fax: 0243.5626782

Email: vanphonganphu@yahoo.com

Website: www.anphumedical.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BĂNG DÍNH Y TẾ AN PHÚ

1. Giới thiệu sản phẩm

Băng dính y tế An Phú là sản phẩm thông dụng dùng trong bảo vệ vết thương, dán trực tiếp lên gạc để bảo vệ vết thương.

Vật liệu: - Nguyên liệu vải silk
- Keo: kềm Oxyt; Acrylic

2. Chỉ định

Sử dụng để dán lên gạc, cố định vết thương, cố định kim tiêm...

3. Chống chỉ định

Không dán trực tiếp lên vết thương, không dán lên khu vực mắt và vùng lân cận bộ phận này.

4. Cảnh cáo và thận trọng

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ trong trường hợp vết thương được dán bị mẩn đỏ, phát ban.

5. Hướng dẫn sử dụng

Làm sạch và khô vết thương trước khi dán băng dính y tế, dán trực tiếp lên gạc vị trí cần dán. Thay băng dán khi cần thiết, băng dán chỉ sử dụng một lần.

6. Xử lý chung

Không sử dụng sản phẩm đã qua sử dụng hay sản phẩm hết hạn, kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm được dán tốt.

7. Bảo quản

Khu vực bảo quản được vệ sinh sạch sẽ để tránh chịu ẩm, ẩm ướt và ô nhiễm từ môi trường, tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, không sử dụng sản phẩm đã hết hạn, bảo quản sản phẩm nơi khô ráo.

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở

