



Trụ sở: Nhà B5, Khu nhà ở thấp tầng số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh,
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: 024 3773 9718
Website: www.eapharma.vn Email: contact@eapharma.vn

MẪU NHÃN SẢN PHẨM LADYBALANCE



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thọ



TEM PHỤ



VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO LADYBALANCE

Thành phần: Lactose monohydrate, magnesium stearate và silicium dioxide.

Hộp 1 vỉ x 12 viên nén.

Lô SX: NSX:

Số ĐKLH: HSD:

Hãng sản xuất: LadyBalance ApS,
Karensdalvej 76, 7100 Vejle, Đan Mạch.

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm Âu Mỹ
Nhà B5, Khu nhà ở thấp tầng số 15, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống
Đa, Hà Nội.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc trước khi dùng.

Chỉ định: Điều trị trong trường hợp viêm nhiễm âm đạo. Giảm khí hư và mùi hôi âm đạo khó chịu do nhiễm khuẩn âm đạo. Giảm tình trạng âm đạo khô, ngứa, rát và đau nhức.

Liều lượng và cách dùng: Dùng ngón tay sạch đặt viên nén vào sâu trong âm đạo. Có thể làm ướt viên nén trước khi đặt.

Điều trị: đặt 1 viên mỗi ngày đến khi triệu chứng được cải thiện (thông thường 1-2 tuần trong trường hợp viêm mãn tính hoặc tái nhiễm cấp độ nhẹ, khí hư có mùi hôi khó chịu). **Điều trị kết**

hợp kháng sinh: đặt ½-1 viên mỗi ngày sau khi điều trị kháng sinh (trong trường hợp bị viêm nhiễm nặng). **Phòng ngừa viêm nhiễm, cân bằng pH, hỗ trợ sinh lý:** đặt ½-1 viên cách ngày.

Lưu ý: LadyBalance chỉ được dùng để đặt âm đạo, không được ăn hoặc nuốt. Để nơi khô ráo và ngoài tầm với của trẻ em.