

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM LADYBALANCE



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Thọ



Nguồn cội của đấm say

Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

LadyBalance® là một prebiotic có tác dụng phục hồi độ pH tự nhiên và duy trì âm đạo khỏe mạnh.

Chỉ định: Giảm khí hư và mùi hôi âm đạo khó chịu do nhiễm khuẩn âm đạo. Giảm tình trạng âm đạo khô, ngứa, rát và đau nhức.

Liều lượng và cách dùng: Dùng ngón tay sạch đặt viên nên vào sâu trong âm đạo. Có thể làm ướt viên nên trước khi đặt.

• **Điều trị:** Đặt 1 viên mỗi ngày đến khi triệu chứng được cải thiện (thông thường 1-2 tuần đối với trường hợp viêm mãn tính hoặc tái nhiễm cấp độ nhẹ, khí hư có mùi hôi khó chịu).

• **Điều trị kết hợp kháng sinh:** Đặt 1/2 - 1 viên mỗi ngày sau khi điều trị kháng sinh (đối với trường hợp viêm nhiễm nặng).

• **Phòng ngừa, cân bằng pH, hỗ trợ sinh lý:** Đặt 1/2 - 1 viên cách ngày.

Thành phần: Lactose monohydrate, magnesium stearate and silicon dioxide.

Không sử dụng trong trường hợp bị dị ứng với sữa - bao gồm các sản phẩm có thành phần protein sữa. LadyBalance® có thể được sử dụng trong các trường hợp không dung nạp lactose.

Hỏi ý kiến bác sĩ nếu thấy hiện tượng âm đạo đau, chảy máu hoặc có khí hư màu vàng - xanh mùi khó chịu - trong trường hợp này bạn có thể bị nhiễm Trichomonas.

Khuyến cáo không dùng LadyBalance® nếu bạn đang dùng thuốc đặt âm đạo có chứa vi khuẩn hoặc men (bao gồm các sản phẩm có thành phần chính từ sữa) - điều này có thể làm giảm tác dụng của LadyBalance® hoặc gây ra các tác dụng phụ.

LadyBalance® dùng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi (trừ trẻ em).

LadyBalance® có thể sử dụng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú; nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu bị viêm nhiễm trong thời kỳ mang thai hoặc triệu chứng dai dẳng kéo dài.

LadyBalance® chỉ được dùng để đặt âm đạo, không được nuốt do có thể gây tắc cổ họng.

Đặt nơi khô ráo và ngoài tầm với của trẻ em.

Tác dụng phụ: Dịch tiết trong hoặc có gợn (tỷ lệ 1/10); các hiện tượng sau có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ: mùi men, buồn tiểu, đau đầu, rát, chảy máu nhẹ (tỷ lệ 1/100 đến 1/10). Các triệu chứng này được cải thiện sau khi dùng điều trị.

Hãng sản xuất: LadyBalance ApS
Karensdalvej 76, 7100 Vejle, Denmark.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập:
www.ladybalance.com

Hãng phân phối: Công ty TNHH Phân Phối Dược Phẩm Âu Mỹ, Nhà B5, số 15, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
www.eapharma.com.vn

LadyBalance® là nhãn hiệu đã được đăng kí của Tập Đoàn IDH ApS.

