


## MẪU NHÃN PHỤ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

### BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH NIPRO

#### I.V. ADMINISTRATION SET

ISA-003AS\_NST

**Số đăng ký lưu hành: 220000266/PCBB-HCM**

**Số lô SX, HD:** xem “LOT”, “” trên bao bì sản phẩm. **Xuất xứ:** Trung Quốc. **Nhà sản xuất:** Amsimo Medical (Kunshan) Co., Ltd., 582 Lidu Road, Qiandeng Town, 215343 Kunshan City, 215343 Trung Quốc. **Chủ sở hữu sản phẩm:** Amsino International, Inc., 708 Corporate Center Drive, Pomona CA 91768, Mỹ. **Chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam, Nhập khẩu, Phân phối:** CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM, địa chỉ tại Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. **Hướng dẫn sử dụng:** Kiểm tra bao bì nguyên vẹn, Đóng nắp, mở nắp bảo vệ số 1, Chèn đầu dây truyền dịch vào nút cao su của bình dịch, bóp buồng nhỏ giọt để kích hoạt dịch nhỏ ra từ bình dịch, nhỏ dịch đến nửa bình dịch, Mở nắp bảo vệ số 11, mở kẹp tốc độ, cho dịch chảy qua đường dây để đuổi khí, kết nối đầu dây dịch với các dụng cụ nối khác như dây nối truyền dịch hoặc khóa ba ngã hoặc công tiêm không kim và nối với kim luồn tĩnh mạch, Bắt đầu truyền dịch, có thể điều chỉnh tốc độ bằng kẹp cuộn. **Cảnh báo và thận trọng:** Chỉ sử dụng 1 lần. Không được tái sử dụng, Không sử dụng nếu bao bì hư hỏng hay hết hạn sử dụng.

Ký mã hiệu: N-ISA-003AS-NST-ECE


## MẪU NHÃN PHỤ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

### BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH NIPRO

#### I.V. ADMINISTRATION SET

ISA-004AS\_NST

**Số đăng ký lưu hành: 220000266/PCBB-HCM**

**Số lô SX, HD:** xem “LOT”, “” trên bao bì sản phẩm. **Xuất xứ:** Trung Quốc. **Nhà sản xuất:** Amsimo Medical (Kunshan) Co., Ltd., 582 Lidu Road, Qiandeng Town, 215343 Kunshan City, 215343 Trung Quốc. **Chủ sở hữu sản phẩm:** Amsino International, Inc., 708 Corporate Center Drive, Pomona CA 91768, Mỹ. **Chủ sở hữu số lưu hành tại Việt Nam, Nhập khẩu, Phân phối:** CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM, địa chỉ tại Phòng 15.06 và 15.07, Tầng 15, Toà nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. **Hướng dẫn sử dụng:** Kiểm tra bao bì nguyên vẹn, Đóng nắp, mở nắp bảo vệ số 1, Chèn đầu dây truyền dịch vào nút cao su của bình dịch, bóp buồng nhỏ giọt để kích hoạt dịch nhỏ ra từ bình dịch, nhỏ dịch đến nửa bình dịch, Mở nắp bảo vệ số 11, mở kẹp tốc độ, cho dịch chảy qua đường dây để đuổi khí, kết nối đầu dây dịch với các dụng cụ nối khác như dây nối truyền dịch hoặc khóa ba ngã hoặc cổng tiêm không kim và nối với kim luôn tĩnh mạch, Bắt đầu truyền dịch, có thể điều chỉnh tốc độ bằng kẹp cuộn. **Cảnh báo và thận trọng:** Chỉ sử dụng 1 lần. Không được tái sử dụng, Không sử dụng nếu bao bì hư hỏng hay hết hạn sử dụng.

Ký mã hiệu: N-ISA-004AS-NST-ECE